



Sehr geehrte Kundin und geehrter Kunde,

in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Gerätesicherungen auslösen und die Tür sich infolge des dadurch eingetretenen Stromausfalls nicht öffnen lässt, gehen Sie bitte wie folgt vor:


- ⚠ 1. Lassen Sie unbedingt das Gerät abkühlen (ca. 35 min warten)! ⚠

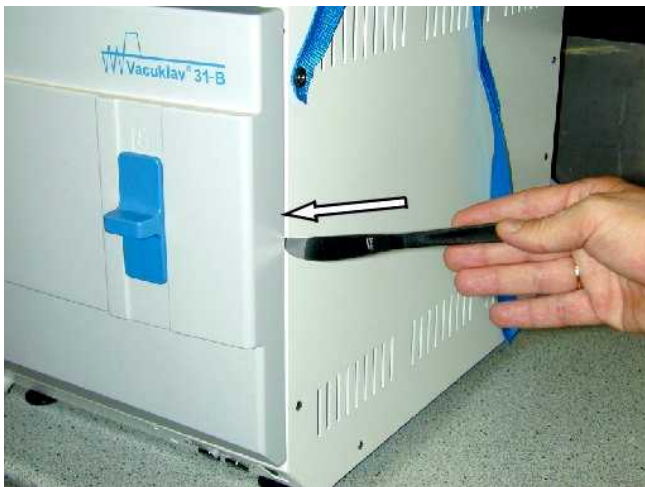


2. Führen Sie bitte **vorsichtig** einen messerähnlichen Gegenstand zwischen Kunststoff-Tür und Frontplatte des Sterilisators ein (in Höhe des Türgriffes).

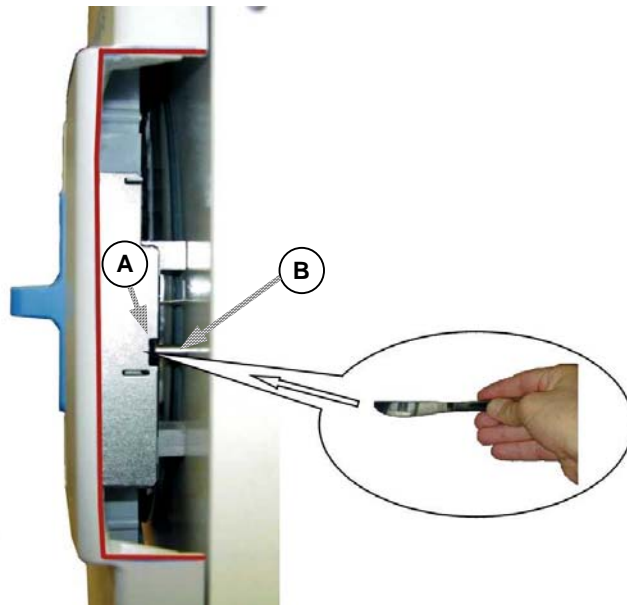

3. Die Ansicht einer aufgeschnittenen Tür zeigt Ihnen, wo Sie mit dem messerähnlichen Gegenstand **zwischen** die Blech-Ausstanzung (A) und den Verriegelungs-Stift (B) gelangen müssen.

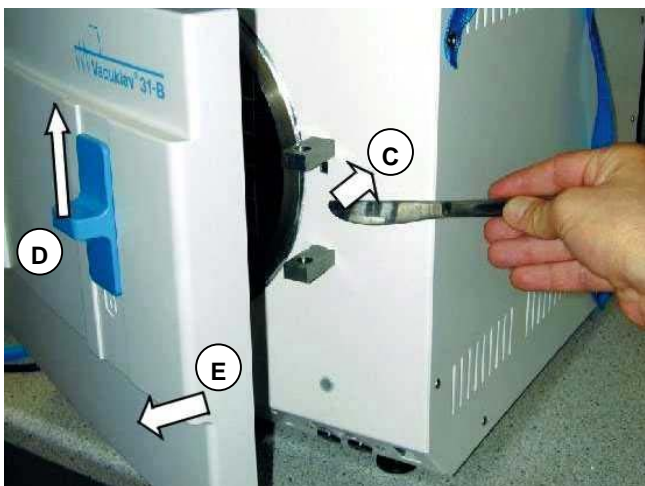

4. Nun drücken Sie bitte den Verriegelungs-Stift (B) in Pfeilrichtung (C) zur Frontplatte und **halten** ihn in dieser Position.  
5. Schieben Sie den nun freigegebenen Türgriff nach oben (D).  
6. Jetzt können Sie die Tür öffnen (E).

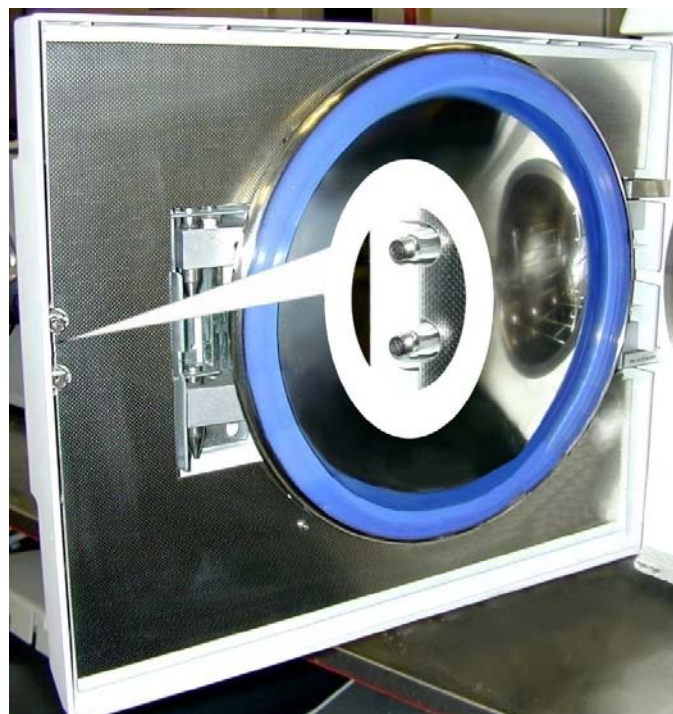

7. Die Ersatzsicherungen können jetzt aus der Kunststoff-Tür entnommen werden.  
8. Tauschen Sie die defekten Sicherungen aus. Gehen Sie dabei nach der Bedienungsanweisung des Sterilisators vor.

**Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise in der Bedienungsanweisung!**