


ALM

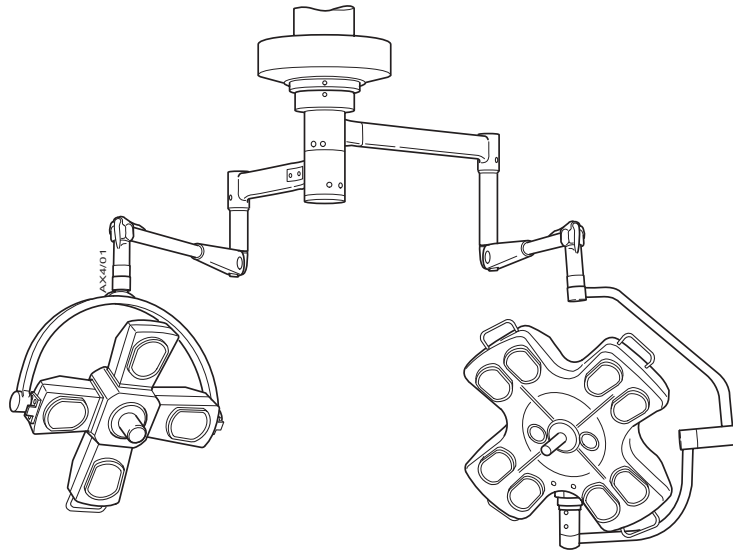

anḡenieux

AX4 / AX10 / AX14

Éclairage Opérateur
Surgical Lighting System
OP-Leuchten

Notice Technique
Technical Manual
Technische Anleitung

AX/NTC/03/00 Réf. 010733103 Edition 03

*** GETINGE**

EXIGENCES QUALITE

Certification du système qualité de l'entreprise A.L.M.

L'AFAQ et le G-MED attestent que le système adopté par ALM pour la conception et la réalisation des tables d'opérations et des éclairages opératoires, a été évalué et jugé conforme aux exigences des normes ISO 9001. Version 1994 (Certificat AFAQ n°1989/032) et EN-46001 Version 1994 (Certificat G-MED n° 0222/46001/1).

La norme EN-46001 constitue le nouveau référentiel européen d'assurance qualité pour les fabricants de matériel médical.

Marquage CE

L'éclairage PRISMALIX appartient à la classe I et satisfait aux dispositions du décret n° 95-292 du code de la santé publique (Annexe VII de la directive 93/42/CEE du 14.06.1993 relative aux dispositifs médicaux) qui lui sont applicables.

Certification des produits A.L.M.

L'éclairage PRISMALIX a été conçu en conformité avec les normes internationales IEC 601-1 (EN 60-601-1) ainsi qu'avec le projet de norme particulière IEC 601.2.41.

La gamme de coffrets d'alimentation "ENERGIX WPS" a été conçue en conformité avec les standards suivants :

- IEC 601/1,
- UL 2601,
- IEC 601/1/2,
- FCC part 15,
- IEC 1000-3-2.

QUALITY COMPLIENCE

Certification of ALM quality system.

AFAQ and G-MED certify that the system implemented at ALM for design and production of operating tables and surgical lights complies with the requirements of standard ISO 9001.

Version 1994 (AFAQ certificate No. 1989/032) and EN-46001 Version 1994 (G-MED Certificate No. 0222/46001/1).

The standard EN-46001 is the new European quality assurance baseline for medical equipment manufacturers.

EC marking

The PRISMALIX surgical light is part of class I and satisfies the provisions of decree No. 95-292 of the public health code (Appendix VII of directive 93/92/EEC dated 14/06/1993 relative to medical equipment) as may be applicable.

Certification of ALM products

The PRISMALIX surgical light is designed in compliance with international standards IEC 601-1 (EN 60-601-1) and with specific draft standard IEC 601.2.41.

The "ENERGIX WPS" power supply units are designed in compliance with the following standards:

- IEC 601/1,
- UL 2601,
- IEC 601/1/2,
- FCC part 15,
- IEC 1000-3-2.

QUALITÄTSANFORDERUNGEN

Zertifizierung des QM-Systems von A.L.M.

Die AFAQ und G-MED bescheinigen, das System von A.L.M. für den Entwurf und die Herstellung der OP-Tische und OP-Leuchten bewertet und die Übereinstimmung mit den Anforderungen der Normen ISO 9001, Fassung 1994 (AFAQ-Zertifikat Nr. 1989/032) und EN-46001, Fassung 1994 (G-MED-Zertifikat Nr. 0222/46001/1) positiv beurteilt zu haben.

Die Norm EN-46001 ist für die Hersteller medizinischer Geräte das neue europäische Bezugssystem für Qualitätssicherung.

EG-Zeichen

Die Leuchten PRISMALIX gehört zur Klasse I und entspricht den für diese Klasse geltenden Bestimmungen des Erlasses Nr. 95-292 des Gesetzbuches für öffentliche Gesundheit (Anhang VII der Richtlinie 93/42/EG vom 14.06.1993 für medizinische Geräte)

Zertifizierung der Erzeugnisse von A.L.M.

Die Leuchten PRISMALIX wurde in Übereinstimmung mit den internationalen Normen IEC 601-1 (EN 60-601-1) sowie mit der Sondernorm IEC 601.2.41 entworfen.

Das Angebot der Stromversorgungsgerät «ENERGIX WPS» wurde in Übereinstimmung mit folgenden Standards entworfen:

- IEC 601/1,
- UL 2601,
- IEC 601/1/2,
- FCC Teil 15,
- IEC 1000-3-2

SOMMAIRE	CONTENTS	INHALT
Exigences qualité 2	<i>Quality compliance</i> 2	Qualitätsanforderungen 2
Garantie 4	<i>Warranty</i> 4	Garantie 4
1 - Réglage des bras ressort AX10 / AX14 et AX4 7	<i>1 - Adjustment of AX10 / AX14 and AX4 spring arms</i> 7	1 - Einstellung der Federarme AX10 / AX14 y AX4 7
2 - Réglage du débattement 7	<i>2 - Maximum height adjustment</i> 7	2 - Einstellung der Schwenkung 7
3 - Les 4 clés de maintenance 9	<i>3 - The 4 maintenance keys 9</i>	3 - Die 4 Schlüssel zur Wartung 9
4 - Nettoyage interne du projecteur AX4 11	<i>4 - Internal cleaning of AX4 lighthead</i> 11	4 - Innenreinigung der AX4- Operationsleuchten 11
5 - Procédure de réglage des miroirs d'AX4 13	<i>5 - Adjustment procedure for the AX4 mirrors</i> 13	5 - Einstellungsverfahren der AX4-Spiegel 13
6 - Nettoyage interne du projecteur AX10 15	<i>6 - Internal cleaning of AX10 lighthead</i> 15	6 - Innenreinigung der AX10- Operationsleuchten 15
7 - Nettoyage interne du projecteur AX14 17	<i>7 - Internal cleaning of AX14 lighthead</i> 17	7 - Innenreinigung der AX14- Operationsleuchten 17
8 - Procédure de réglage des miroirs d'AX14 19	<i>8 - Adjustment procedure for the AX14 mirrors</i> 19	8 - Einstellungsverfahren der AX14-Spiegel 19
9 - Changement des douilles sur le bloc optique 23	<i>9 - Replacement of the plugs on the optical bloc</i> 23	9 - Auswechseln der Buchsen auf dem optischen Block 23
10 - Nomenclatures et planches 25	<i>10 - Parts lists and drawings</i> 25	10 - Stückliste und Zeichnungen 25
Interventions spécifiques 64	<i>Specific interventions</i> 64	Spezifische Eingriffe 64

GARANTIE

ALM garantit le matériel fourni contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une période de 24 mois à dater de sa réception et au plus tard 30 mois après livraison dans les conditions contractuelles, à l'exception des caméras (12 mois).

La garantie ne couvre que les fournitures d'ALM.

Elle est limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses. Les frais de main-d'oeuvre, de séjour et d'assurance du personnel chargé d'effectuer le remplacement des pièces reconnues défectueuses sont tous à la charge du client.

Toute pièce remplacée deviendra la propriété d'ALM et devra lui être retournée dans le mois de son remplacement, faute de quoi ALM se réserve le droit de facturer la valeur de la pièce remplacée.

Les interventions effectuées sous garantie n'entraînent pas de prolongation du délai initial de garantie.

Cette garantie ne s'applique toutefois pas aux pièces d'usure normale et aux consommables (en particulier ampoules, fusibles, porte ampoule, poignée stérilisable etc...)

Pour bénéficier de la garantie, l'acheteur doit prévenir par lettre, ou télécopie confirmé par lettre, de tout défaut dans les 3 jours au plus tard après sa constatation.

L'acheteur doit présenter à ALM toutes les preuves démontrant que la défaillance incombe à ALM et donner toute facilité à ALM pour procéder à leur constatation. ALM conseille l'achat par le client de pièces de rechange et ce, en même temps que le matériel proposé.

ALM pourra utiliser les pièces de rechange existantes chez l'acheteur sous réserve de les remplacer.

ALM fournira sur demande aux techniciens dûment accrédités les principaux schémas électriques et nomenclatures.

La garantie disparaît si les fournitures ont fait l'objet de modifications ou réparations effectuées par l'acheteur ou des tiers sans l'accord écrit préalable d'ALM.

Cette garantie exclut tout versement d'indemnités.

Les engagements de cette garantie sont personnels à l'acheteur et cessent dès l'instant où il cède le matériel.

 La garantie ne couvre pas :

- Les incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure tels que décrits à l'article X des conditions générales de vente,
- Les réparations ou remplacements imposés par l'usure normale du matériel,
- Les détériorations ou accidents provenant du fait du client tels que négligence, défaut de surveillance, erreurs de branchement, inobservation des consignes de mise en service ou d'entretien, utilisation anormale provenant notamment de surcharges de toute sorte.
- La garantie ne s'applique plus lorsqu'une ampoule autre que celle proposée par ALM est utilisée.

WARRANTY

ALM warrants the equipment against all material or manufacturing defects for a period of 24 months after shipment or a maximum of 30 months after delivery in accordance with the contract, whichever period ends first. Cameras systems have a 12 months warranty only.

The warranty covers ALM-supplied equipment only.

The warranty is limited to replacement of parts acknowledged to be defective. The labor, travel, living and insurance expenses of the crew replacing parts acknowledged to be defective are the responsibility of the customer.

Title to replaced parts shall revert to ALM and these parts shall be returned to ALM within one month of replacement; otherwise ALM reserves the right to charge the customer for the replaced part.

Repairs performed under warranty do not extend the initial warranty period.

This warranty does not cover the normal wear and tear of parts, nor does it apply to consumables (in particular bulbs, fuses, bulb holder, sterilizable handle, etc.).

To benefit from the terms of this warranty, the Purchaser must inform ALM of any defect by letter or by Fax followed by letter of confirmation within 3 days of discovery of the defect.

The Purchaser shall provide ALM with all evidence that the defect is incumbent on ALM and provide ALM with every facility to investigate the same. ALM recommends that the customer purchase spare parts simultaneously with the equipment.

ALM may use the Purchaser's spare parts subject to replacement thereof.

On request, ALM will supply the main electrical diagrams and parts lists to the duly accredited technicians.

The warranty shall not apply to any supplies which have been altered or repaired by the Purchaser or any other party without prior written consent by ALM.

No damages are recoverable under this warranty.

The obligations of this warranty shall apply to the Purchaser only and cease to apply as of disposal of the equipment to a third party by the Purchaser.

 **The warranty does not cover:**

- Incidents caused by fortuitous events or force majeure as described in article X of the general conditions of sale.
- Repair or replacement required due to normal wear of the equipment.
- Damage or accidents due to the customer such as negligence, lack of supervision, faulty installation, disregard of operating or maintenance instructions, overload of any kind due to improper usage...
- Warranty shall no longer apply when bulb, other than bulb proposed by ALM, is used.

GARANTIE

ALM gewährt auf die gelieferten Geräte eine Garantie von 24 Monaten ab Empfang und von höchstens 30 Monaten nach Lieferung unter Vertragsbedingungen für Werkstoff- oder Herstellungsfehler, abgesehen von den Kameras (12 Monate).

Die Garantie betrifft ausschließlich die Lieferungen von ALM.

Sie ist auf den Ersatz der als defekt anerkannten Teile beschränkt. Die Lohn-, Aufenthalts- und Versicherungskosten für das mit dem Ersetzen der als defekt anerkannten Teile beauftragten Personals gehen alle zu Lasten des Kunden.

Ersetzte Teile werden zum Eigentum von ALM und müssen in dem Monat, in dem sie ausgewechselt werden, an ALM zurückgesandt werden, mangels dessen sich ALM das Recht vorbehält, den Wert des ersetzten Teils in Rechnung zu stellen.

Die im Rahmen der Garantie durchgeführten Eingriffe bewirken keine Verlängerung der ursprünglichen Garantiedauer.

Diese Garantie gilt allerdings nicht für normale Verschleißteile und Verbrauchsmaterial (insbesondere Lampen, Sicherungen, Lampenhalterungen, sterilisierbare Griffe usw.)

Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss der Käufer Mängel spätestens innerhalb von 3 Tagen nach der Feststellung per Brief bzw. per Fax mit anschließender brieflicher Bestätigung anmelden.

Der Käufer muss ALM alle Beweise vorlegen, aus denen hervorgeht, dass der Mangel auf ALM zurückzuführen ist und ALM die Feststellung des Mangels möglichst erleichtern. ALM empfiehlt den Kauf von Ersatzteilen durch den Kunden gleichzeitig mit den vorgeschlagenen Geräten.

ALM kann die beim Käufer vorliegenden Ersatzteile benutzen, muss sie dem Käufer aber ersetzen.

ALM verpflichtet sich, den geschulten Technikern auf Anfrage die wichtigsten Schaltpläne und Stücklisten zu liefern.

Die Garantie erlischt, wenn die Lieferungen vom Käufer oder Dritten ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von ALM geändert oder repariert wurden.

Die vorliegende Garantie schließt die Zahlung von Entschädigungen aus.

Die vorliegenden Garantieverpflichtungen sind persönlich an den Käufer gebunden und werden bei Veräußerung oder Abtretung des Gerätes ungültig.

 Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Unvorhersehbare Zwischenfälle oder Fälle höherer Gewalt, wie sie im Artikel X der allgemeinen Verkaufsbedingungen beschrieben sind,
- Reparaturen oder Ersatz aufgrund des normalen Verschleißes der Geräte,
- Beschädigungen oder Unfälle, die auf den Kunden zurückzuführen sind, wie Nachlässigkeit, mangelnde Überwachung, falsche Anschlüsse, Verstoß gegen die Vorschriften für Inbetriebnahme und Wartung, Überlastungen aller Art, insbesondere infolge unangemessener Verwendung.

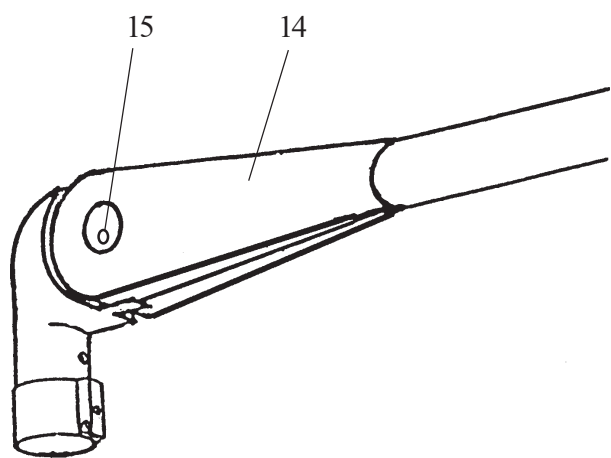


FIG. 3

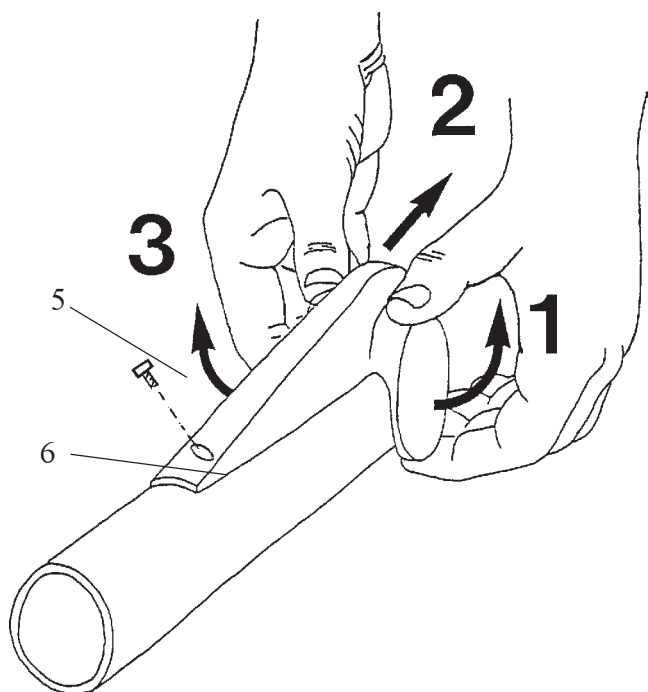
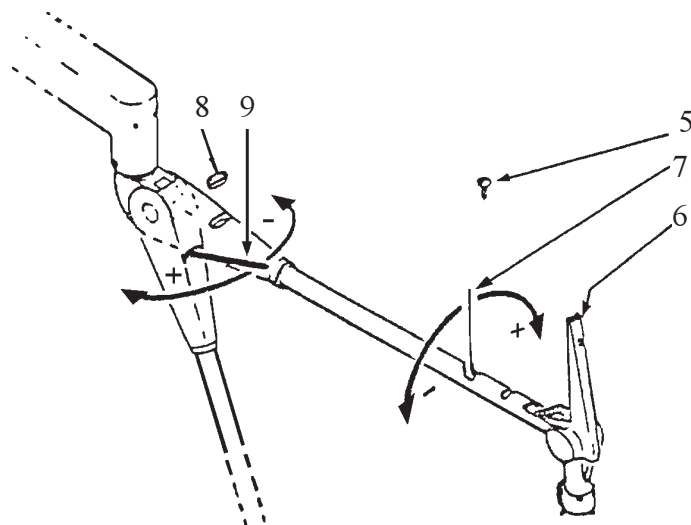


FIG. 1

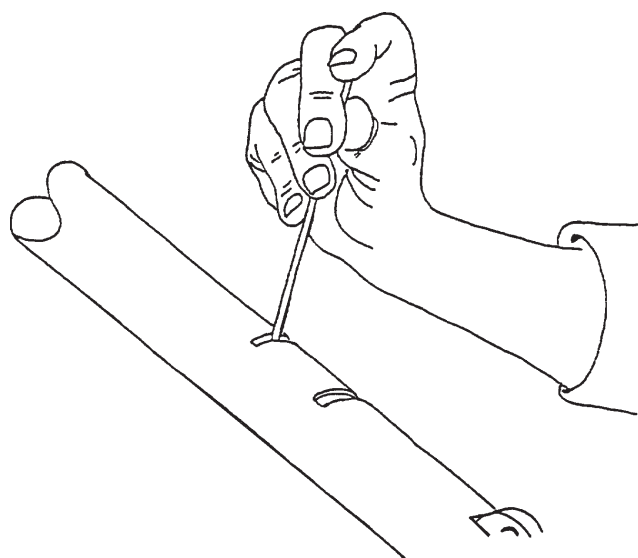


FIG. 2

1 - REGLAGE DES BRAS RESSORT AX10 / AX14 ET AX4

AX 10 - AX 4

- 1) Retirer la vis (5) et le cache (6) (FIG. 1).

AX 14

- 1) Retirer les 2 vis (15) et les 2 caches (14) (FIG. 3)
- 2) Amener le bras ressort à l'horizontale jusqu'à voir la bague à trous apparaître dans l'ouverture.
- 3) (FIG. 2) A l'aide de la tige (7) de 4 mm de diamètre fournie avec le bras, tourner la bague.

Sens (+) si la tête d'éclairage tend à descendre.

Sens (-) si la tête d'éclairage tend à monter.

2 - REGLAGE DU DEBATTEMENT

- 1) Enlever le couvercle (8) au moyen d'une tige de 4 mm de diamètre placée dans l'un des deux trous.
- 2) Abaisser le bras ressort jusqu'à voir la bague à trous apparaître dans l'ouverture.
- 3) A l'aide de la tige (9) de 4 mm de diamètre, tourner la bague.

Sens (-) pour obtenir la course maximale vers le bas.

Sens (+) pour obtenir la course maximale vers le haut.

1 - ADJUSTMENT OF AX10 / AX14 AND AX4 SPRING ARMS

AX 10 - AX 4

- 1) Remove the screw (5) and cover plate (6) (FIG. 1).

AX 14

- 1) Remove the 2 screws (15) and the 2 cover plates (14) (FIG. 3).
- 2) Place the spring arm in a horizontal position until you see the ring with the holes in the opening.
- 3) (FIG. 2) Use the 4 mm diameter rod (7) (provided) to rotate the ring.

(+) If the lighthouse tends to move downward.

(-) If the lighthouse tends to move upward.

2 - MAXIMUM HEIGHT ADJUSTMENT

- 1) Remove the cover (8) with the aid of a 4 mm diameter rod placed in one of the two holes.
- 2) Move the spring arm down until you see the ring with the holes in the opening.
- 3) Use the 4 mm diameter rod (9) to rotate the ring.

(-) In order to obtain maximum downward travel.

(+) In order to obtain maximum upward travel.

1 - EINSTELLUNG DER FEDERARME AX10 / AX14 Y AX4

AX 10 - AX 4

- 1) Die Schraube (5) und die Deckplatte (6) entfernen (Abb.1).

AX 14

- 1) Die 2 Schrauben (15) und die 2 Deckplatten (14) entfernen (Abb.3).
- 2) Den Federarm in waagrechte Lage bringen, bis der Ring mit den Löchern in der Öffnung sichtbar wird.
- 3) Gemäß Abb.2 den 4 mm dicken Stab (7) (mit den Arm geliefert) benutzen, um den Ring zu drehen.

(+) wenn die Kuppel dazu neigt, sich nach unten zu bewegen.

(-) wenn die Kuppel dazu neigt, sich nach oben zu bewegen.

2 - EINSTELLUNG DER SCHWENKUNG

- 1) Mit Hilfe eines in einem der beiden Löcher eingesetzten 4-mm-Stabs die Abdeckung (8) entfernen.
- 2) Den Federarm so weit nach unten bewegen, bis der Ring mit den Löchern in der Öffnung erscheint.
- 3) Den 4 mm dicken Stab (9) benutzen, um den Ring zu drehen.

(-) um den maximalen Weg nach unten zu erhalten.

(+) um den maximalen Weg nach oben zu erhalten.

3 - LES 4 CLES DE LA MAINTENANCE

I. Serrage

- Alimentation électrique du projecteur, douilles sur blocs optiques.
- Borniers de raccordement dans l'armoire de commande.

II. Réglage

- Tension aux bornes des lampes en position maxi du commutateur.

22,7 V + 0,5 pour l'AX14
23,3 V + 0,5 pour l'AX10
25,6 V + 0,5 pour l'AX4 70W
21,7 V + 0,5 pour l'AX4 150 W

- Focalisation : Tache ronde et homogène.

III. Contrôle

III.1. Points de sécurité

- Rigidité de la fixation.
- Serrage de l'écrou du monte et baisse.
- Présence de la vis à bout téton sur l'écrou du monte et baisse.
- Appareils antérieurs à 1998, contrôler le serrage des 3 vis à bout pointeau d'immobilisation de l'écrou du monte et baisse.
- Serrage des vis et écrous d'assemblage des sous-ensembles composants l'installation.

- Positionnement du circlips sur l'allonge des suspensions compensées.
- Positionnement du secteur d'arrêt et de la bague de retenue pour chaque projecteur.
- Fonctionnement sur secours (manuel par bouton poussoir et automatique par coupure secteur).

III.2. Autres contrôles

- Eclairage nominal à 1 m du projecteur en position maxi du commutateur : 45 000 lux pour AX4 70W.
- 60 000 lux pour AX4 150W hublots en verre cathédrale.
- 80 000 lux pour AX4 150 W hublots micro lentilles.
- 100 000 lux pour AX10 hublots en verre cathédrale.
- 110 000 lux pour AX10 hublots micro lentilles.
- 120 000 lux pour AX14 hublots en verre cathédrale.
- 130 000 lux pour AX14 hublots micro lentilles.

- Fonctionnement sur toutes les positions du commutateur.
- Etat des supports de lampes et des lampes.
- Propreté interne : Blocs optiques, miroirs, hublots.
- A nettoyer une fois par an.
- Continuité des masses : 0,1 W maxi.
- Stabilité des projecteurs dans toutes les positions.
- Régularité des couples de rotation, absence de points durs.
- Tenue de la poignée stérilisable.

IV. Aspect Nettoyage.

CONSOMMABLES

Type de projecteur	Réf. lampe	Support lampe	Poignée stérile
AX14	150W 24V 163508	162798	187306
AX10	100W 24V 186762	162798	187306
AX4 150W	150W 24V 163508	162798	187306
AX4 100W	100W 24V 186762	162798	187306

3 - THE 4 MAINTENANCE KEYS

I. Tightening

- Light head power supply, plugs onto the optical blocks.
- Electrical connections in the control box.

II. Setting

- Voltage at the bulbs in maximum position of the switch.

22,7 V + 0,5 for AX14
23,3 V + 0,5 for AX 10
25,6 V + 0,5 for AX4 70 W
21,7 V + 0,5 for AX4 150 W

- Focus: Patch circular and homogenous.

III. Control of working conditions

III .1. Safety checks

- Rigidity of the attachment.
- Tightening of the balance arm large nut.
- Presence of the safety screw on the balance arm nut.
- Appliances prior to 1998, check the tightening of the three immobilizing set screws of the balance arm large nut.
- Tightening of assembling screws of articulations.

- Correct position of the retaining ring on the extender of the double spring arm suspension.
- Correct position of the securing clip and the plastic ring.
- Stand by power (manual and automatic).

III. 2. Others controls

- Nominal illumination at 1 m of the projector in maximum position of the switch:
- 45 000 lux for AX4 70 W.
- 60 000 lux for AX4 150 W with glass ports.
- 80 000 lux for AX4 150 W with microlenses ports.
- 100 000 lux for AX10 with glass ports.
- 110 000 lux for AX10 with microlenses ports.
- 120 000 lux for AX14 with glass ports.
- 130 000 lux for AX14 with microlenses ports.

- Working on all positions of the switch.
- Bulb holder and lamps.
- Internal cleaning, optical blocks, mirrors, glass ports.

- Cleaning, once a year.
- Ground continuity: 0,1 W maximum.
- Stability in all positions.

- Regularity in rotation torque.

- Sterilizable handle locking device.

IV - Appearance

- External cleaning.

EDIBLES

Type of light	Bulb Ref.	Bulb holder	Sterile handle
AX14	150W 24V 163508	162798	187306
AX10	100W 24V 186762	162798	187306
AX4 150W	150W 24V 163508	162798	187306
AX4 100W	100W 24V 186762	162798	187306

3 - DIE 4 SCHLÜSSEL ZUR WARTUNG

I. Festigkeit

- Stromversorgung der Operationsleuchte, Buchsen auf den optischen Blocks.
- Anschlussklemmen auf dem Bedienschrank.

II. Einstellung

- Spannung an den Glühlampenklemmen bei Höchststellung des Schalters :

22,7 V + 0,5 an der AX14.
23,3 V + 0,5 an der AX10.
25,6 V + 0,5 an der AX4 70 W.
21,7 V + 0,5 an der AX4 150 W.

- Fokussierung : Runder und homogener Fleck.

III. Kontrolle

III.1. Sicherheitspunkte

- Steifheit der Befestigung.
- Festanzug der Mutter des Steig- und Neigsystems.
- Anwesenheit der Schraube mit Zapfen auf der Mutter des Steig- und Neigsystems.
- Bei Maschinen der Baureihen vor 1998, Überprüfung der 3 Arretierschrauben der Mutter des Steig- und Neigsystems.
- Festziehen der Schrauben und Mutter, die zum Zusammenbau der Unterbaugruppen der Installation dienen.
- Stellung des Sicherungsring des Ansatzstücks der ausgeglichenen Aufhängungen.
- Stellung des Anschlag-bogenstücks und des Rückhalterings für jede Operationsleuchte.
- Notfunktion (per Drucktaster und automatisches Ausschalten).

III. 2. Andere Kontrollen

- Spannung an den Glühlampenklemmen bei Höchststellung des Schalters :
- Nennbeleuchtungswert bei Entfernung von 1 m der Operationsleuchte, Schalter in Höchststellung:
- 45.000 Lux an der AX4, 70 W.
- 60.000 Lux an der AX4 150W, Luken aus Katedralglases.
- 80.000 Lux an der AX4 150 W, Luken der Mikrolinsen.
- 100.000 Lux an der AX10, Luken aus Katedralglases.
- 110.000 Lux an der AX10, Luken der Mikrolinsen.
- 120.000 Lux an der AX14, Luken aus Katedralglases.
- 130.000 Lux an der AX14, Luken der Mikrolinsen.

- Funktionsweise in jeder Stellung des Schalters.
- Stabilität der Operationsleuchten in den gesamten Stellungen.

Einmal im Jahr reinigen :

- Schutzleiter-Widerstands: Höchstens 0,1W.
- Innenreinigung: optischen Block, Spiegel, Luken.
- Regelmäßige Umdrehung, Abwesenheit fester Punkte.
- Halt der sterilisierbaren Griffs.

IV - Aussehen

- Außenreinigung.

VERBRAUCHSMATERIALE

Typ OP-Leuchten	Kennz. Leuchte	Leuchten-Halterung	Sterilisierbaren Griff
AX14	150W 24V 163508	162798	187306
AX10	100W 24V 186762	162798	187306
AX4 150W	150W 24V 163508	162798	187306
AX4 100W	100W 24V 186762	162798	187306

010733003-11a

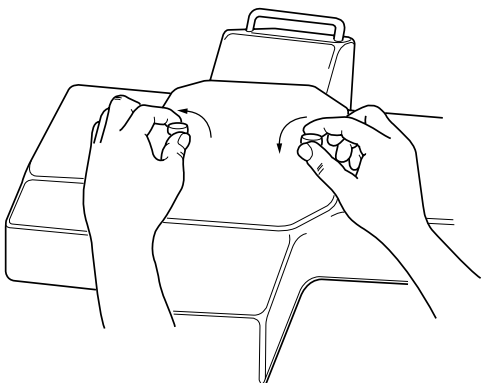


FIG. 1

010733003-11a

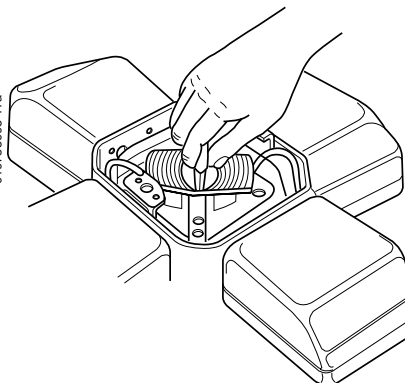


FIG. 2

010733003-11c

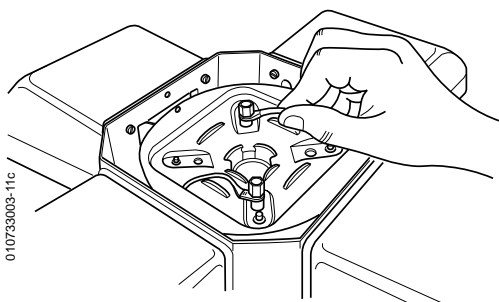


FIG. 3

010733003-11c

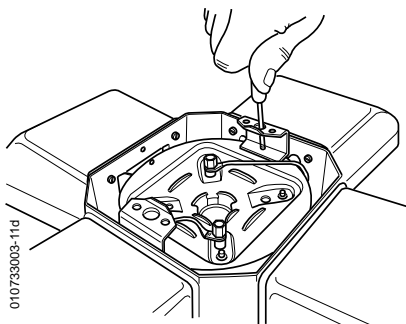


FIG. 4

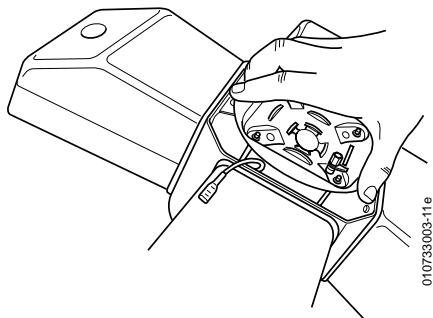


FIG. 5

010733003-11e

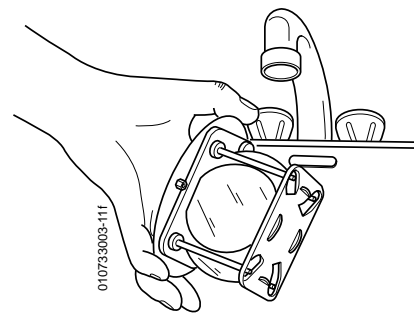


FIG. 6

010733003-11f

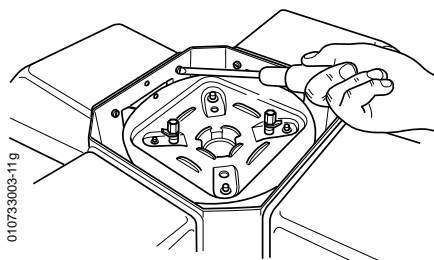


FIG. 7

010733003-11g

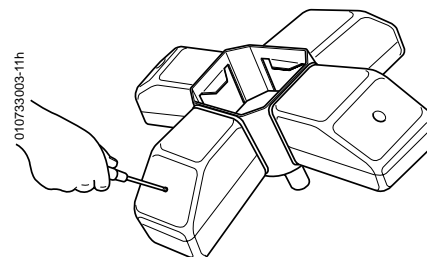


FIG. 8

010733003-11h

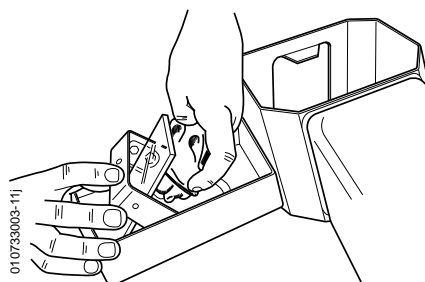


FIG. 9

010733003-11j

010733103-3

4 - NETTOYAGE INTERNE DU PROJECTEUR AX4

- 1) Retirer le capot central (FIG. 1).
- 2) Retirer le support de lampe (FIG. 2).
- 3) Déconnecter les 2 fils sur le bloc optique (FIG. 3).
- 4) Dévisser les 2 vis de maintien du bloc optique et de fixation du système de fermeture du capot central (FIG. 4).
- 5) Retirer le bloc optique.
ATTENTION : Repérer le sens de montage (FIG. 5).
- 6) Passer le bloc optique sous l'eau chaude ou le tremper dans l'eau chaude, puis le sécher avec de l'air comprimé (FIG. 6).
- 7) Dévisser et ôter les 8 vis internes de fixation de capots de bras ainsi que les rondelles éventail (FIG. 7).
- 8) Dévisser les 4 vis externes de fixation des capots de bras (FIG. 8).
- 9) Nettoyer les miroirs et les hublots à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution alcoolisée à moins de 20% (FIG. 9).

4 - INTERNAL CLEANING OF AX4 LIGHTHEAD

- 1) *Remove the central cover (FIG. 1).*
- 2) *Remove the bulbholder (FIG. 2).*
- 3) *Disconnect the 2 wires on the optical block (FIG. 3).*
- 4) *Unscrew the 2 fixation screws of the optical block and of the locking system of the central cover (FIG. 4).*
- 5) *Remove the optical block.*
CAREFUL: Check original positioning (FIG. 5).
- 6) *Rinse the optical block under warm water or dip it in a rinsing bath, then dry it thanks to compressed air (FIG. 6).*
- 7) *Unscrew and remove the 8 internal fixation screws of the arm covers (FIG. 7).*
- 8) *Unscrew the 4 external fixation screws of the arm covers (FIG. 8).*
- 9) *Clean the mirrors and the ports thanks a lintfree cloth and a 20% solution of alcohol (FIG. 9).*

4 - INNENREINIGUNG DER AX4- OPERATIONSLEUCHTEN

- 1) Die zentrale Abdeckhaube entfernen (Abb.1).
- 2) Die Lampenhalterung entfernen (Abb. 2).
- 3) Beide Drähte vom optischen Block abklemmen (Abb. 3).
- 4) Beide Schrauben die zum Halt des optischen Blocks und zur Befestigung des Verschlusssystems der zentrale Abdeckhaube dienen, losschrauben (Abb. 4).
- 5) Den optischen Block entfernen.
ACHTUNG: Die Montageweise merken (Abb. 5).
- 6) Den optischen Block unter warmes Wasser halten oder ihn in warmes Wasser tauchen und mit Druckluft trocknen (Abb. 6).
- 7) Die 8 inneren Befestigungsschrauben der Armverkleidungen losschrauben und mit den Fächerscheiben herausziehen (Abb. 7).
- 8) Die 4 äusseren Befestigungsschrauben der Armverkleidungen losschrauben (Abb.8).
- 9) Die Spiegel und Luken mit einem weichen Tuch, mit leicht alkoholisiertem Mittel imprägniert (höchstens 20 %), reinigen (Abb. 9).

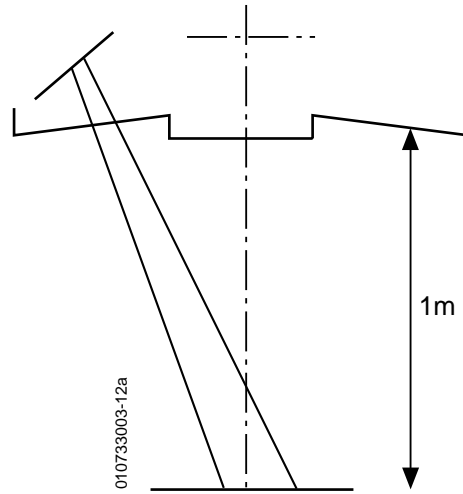


FIG. 1

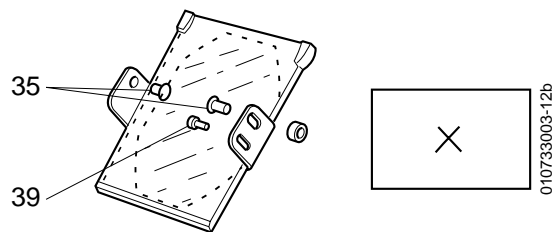


FIG. 2

**5 - PROCEDURE DE
REGLAGE DES MIROIRS
D'AX4**

- 1) Retirer le capot central et les capots de bras.
- 2) Vérifier que la lampe soit bien positionnée sur son support ainsi que le support sur le bloc optique.
- 3) Positionner le projecteur à 1 m d'un plan horizontal.
- 4) Eclairer le projecteur.
- 5) Tourner la poignée pour focaliser les faisceaux au centre.
- 6) Déterminer le centre de la plage à l'aide d'un fil à plomb et faire un repère (FIG. 1).
- 7) Ne plus toucher à la poignée.
- 8) Cacher 3 hublots à l'aide de caches en carton.
- 9) Centrer chaque faisceau sur le repère du centre en agissant sur les axes **(35)** et la vis **(39)** à l'aide de 2 clés plates de 10 mm et une clé intravis de 2,5 mm (FIG. 2).
- 10) Répéter l'opération pour chaque bras.
- 11) Enlever tous les caches et vérifier que la plage soit homogène.

**5 - ADJUSTMENT
PROCEDURE FOR THE AX4
MIRRORS**

- 1) *Remove the central cover and the arm covers.*
- 2) *Check the position of the bulb on the bulbholder and the bulbholder on the optical block.*
- 3) *Place the lighthouse at 1 m from an horizontal plane.*
- 4) *Light the projector.*
- 5) *Turn the handle in order to focus the light beams at the center.*
- 6) *Determine the area center thanks a plumb line and make a mark (FIG. 1).*
- 7) *Do not touch the handle.*
- 8) *Hide 3 windows by means of cardboard masks.*
- 9) *Center each beam onto the center mark in aging onto the axes **(35)** and the screw **(39)** thanks 2 flat wrenches of 10 mm and an allen key of 2,5 mm (FIG. 2).*
- 10) *Repeat the operation for each arm.*
- 11) *Remove all the masks and check that the light patch is homogeneous.*

**5 -
EINSTELLUNGSVERFAHREN
DER AX4-SPIEGEL**

- 1) Die zentrale Abdeckhaube und die Armverkleidungen entfernen.
- 2) Überprüfen, dass die Lampe richtig im Sitz liegt und die Lampenhalterung auf dem optischen Block.
- 3) Die Operationsleuchte auf 1 m einer waagerechten Ebene einstellen.
- 4) Die Leuchte einschalten.
- 5) Den Griff drehen bis dass die Lichtbündel in der Mitte fokussiert sind.
- 6) Die Mitte des Beleuchtungsbereichs mit einem Senkblei bestimmen und kennzeichnen. (Abb. 1).
- 7) Den Griff nicht mehr berühren.
- 8) 3 Luken mit Kartonabdeckungen abdecken.
- 9) Jedes Lichtbündel auf dem Kennzeichen feinstellen durch Betätigung der Achsen **(35)** und der Schraube **(39)**. (zwei 10-mm-Schlüssel und ein 2,5-mm-Inbusschlüssel) (Abb. 2).
- 10) Für jeden Arm, diesen Arbeitsschritt wiederholen.
- 11) Die gesamten Kartonabdeckungen entfernen und überprüfen, dass der Beleuchtungsbereich homogen ausfällt.

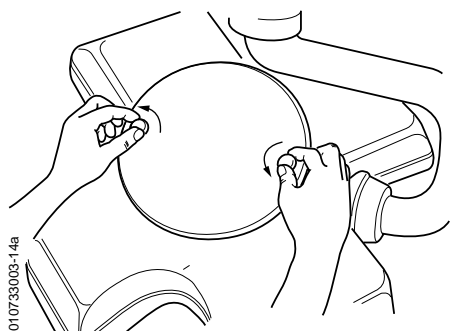


FIG. 1

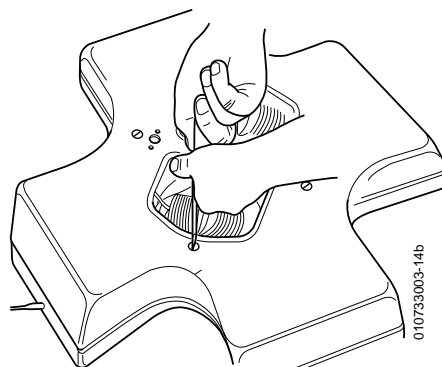


FIG. 2

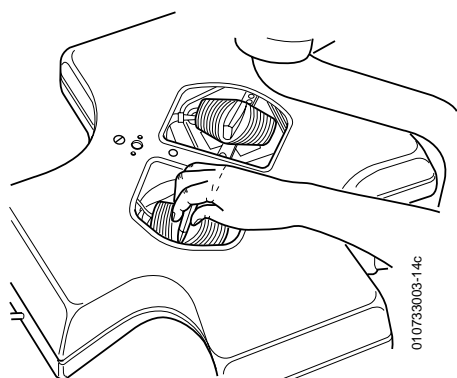


FIG. 3

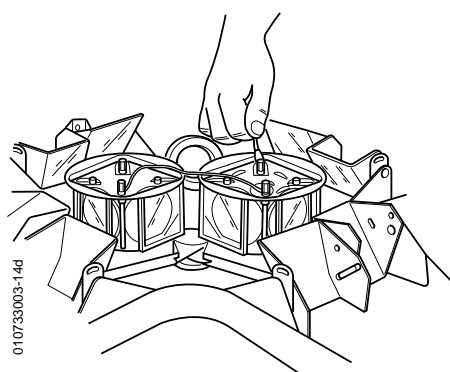


FIG. 4

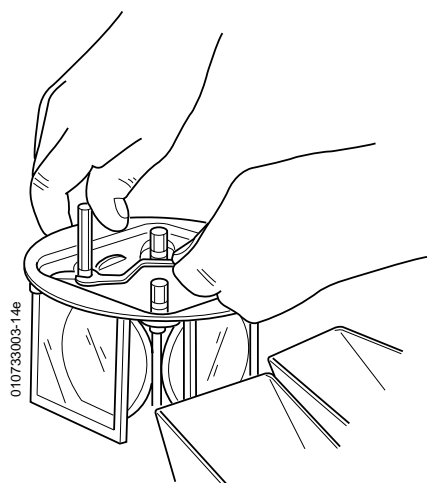


FIG. 5

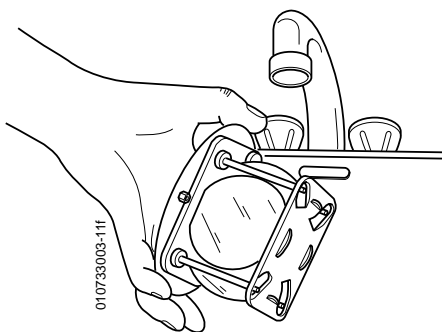


FIG. 6

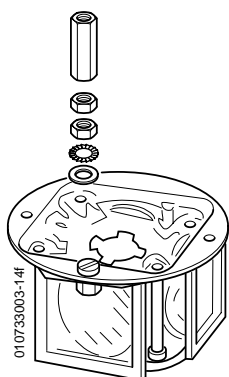


FIG. 7

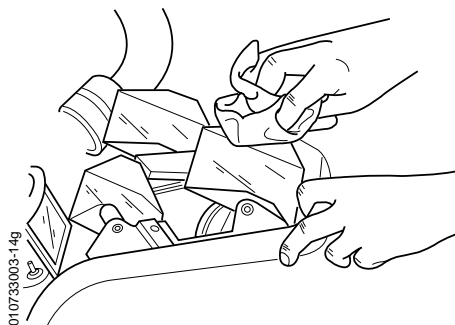


FIG. 8

010733103-3

6 - NETTOYAGE INTERNE DU PROJECTEUR AX10

- 1) Retirer le capot central (FIG. 1).
- 2) Dévisser les 4 vis situées sur la partie supérieure du grand capot ainsi que les 4 vis imperdables situées sur sa périphérie et retirer celui-ci (FIG. 2).
Nettoyer un bloc optique à la fois.
- 3) Retirer le support de lampe (FIG. 3).
- 4) Déconnecter les 2 fils sur le bloc optique (FIG. 4).
- 5) Repérer le hauteur des colonnettes situées sur les tiges filetées de maintien des blocs optiques puis les dévisser, ôter les 4 écrous et contre-écrous, ôter les 2 rondelles éventail et les 2 rondelles de centrage (FIG. 5).
- 6) Retirer le bloc optique.
ATTENTION : Repérer le sens de montage.
- 7) Passer le bloc optique sous l'eau chaude ou le tremper dans l'eau chaude, puis le sécher avec de l'air comprimé (FIG. 6).
- 8) Repositionner le bloc optique sur les 2 tiges filetées en veillant à ce qu'il soit en appui correct sur son support (FIG. 7).
 - Remettre les rondelles de centrage et éventail.
 - Bloquer les 2 premiers écrous sur les rondelles avec les doigts.
 - Bloquer les contre écrous.
 - Ajuster le hauteur des colonnettes et les bloquer.
- 9) Recommencer ces opérations avec le deuxième bloc optique.
- 10) Nettoyer les miroirs et les hublots à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution alcoolisée à moins de 20% (FIG. 8).

6 - INTERNAL CLEANING OF AX10 LIGHTHEAD

- 1) Remove the central cover (FIG. 1).
- 2) Unscrew the 4 screws located on the top of the upper casing as also that the 4 screws located on its periphery and remove it (FIG. 2).
Clean one optical block at a time.
- 3) Remove the bulbholder (FIG. 3).
- 4) Disconnect the 2 wires on the optical block (FIG. 4).
- 5) Check the height of the columns located on the threaded rods which maintain the optical blocks and unscrew them. Unscrew the 4 nuts and counter nuts, remove the 2 notched washers and the 2 centering washers (FIG. 5).
- 6) Remove the optical block.
CAREFUL: Check original positioning.
- 7) Rinse the optical block under warm water or dip it in a rinsing bath, then dry it thanks to compressed air (FIG. 6).
- 8) Put back the optical block in position on the 2 threaded rods and check it is fixed properly on its support (FIG. 7).
 - Replace the centering washers and the notched washers.
 - Tighten the 2 nuts on the washers with the fingers.
 - Tighten the counter nuts.
 - Adjust the height of the columns and tighten them.
- 9) Repeat these operations with the second optical block.
- 10) Clean the mirrors and the ports thanks a lintfree cloth and a 20% solution of alcohol (FIG. 8).

6 - INNENREINIGUNG DER AX10- OPERATIONSLEUCHTEN

- 1) Die zentrale Abdeckhaube entfernen (Abb.1).
- 2) Die 4 Schrauben oberhalb der größeren Abdeckung und die 4 unverlierbaren Schrauben in seiner Nähe losschrauben. Die Abdeckung herausnehmen. (Abb. 2)
Nacheinander die optischen Blocks reinigen.
- 3) Die Lampenhalterung entfernen (Abb. 3).
- 4) Beide Drähte vom optischen Block abklemmen (Abb. 4).
- 5) Die Höhe der Säulen merken. Sie befinden sich auf den Gewindeschrauben, die zum Halt des optischen Blocks dienen. Die Säulen loschrauben : Die 4 Muttern und Gegenmuttern, beide Fächerscheiben und beide Zentrierscheiben herausnehmen. (Abb.5)
- 6) Den optischen Block entfernen.
ACHTUNG: Die Montageweise merken (Abb. 5).
- 7) Den optischen Block unter warmes Wasser halten oder ihn in warmes Wasser tauchen und mit Druckluft trocknen (Abb. 6).
- 8) Den optischen Block erneut auf beide Gewindeschrauben einsetzen. Sich vergewissern dass er richtig auf seinem Halt sitzt (Abb. 7)
 - Die Zentrier- und Fächerscheiben erneut einlegen.
 - Die 2 ersten Muttern mit den Fingern auf die Scheiben setzen.
 - Die Gegenmuttern festziehen.
 - Die Höhe der Säulen ausrichten und festziehen.
- 9) Diesen Arbeitsschritt erneut für den zweiten optischen Block durchführen.
- 10) Die Spiegel und Luken mit einem weichen Tuch mit leicht alkoholisiertem Mittel imprägniert (höchstens 20 %) reinigen (Abb. 8).

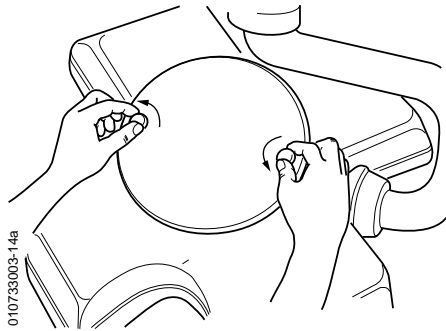


FIG. 1

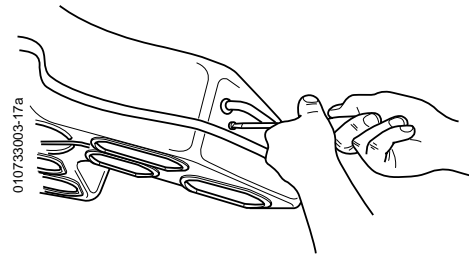


FIG. 2

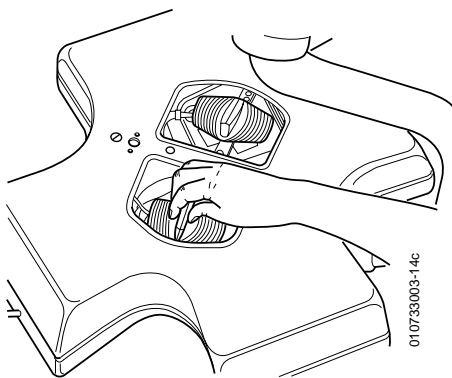


FIG. 3

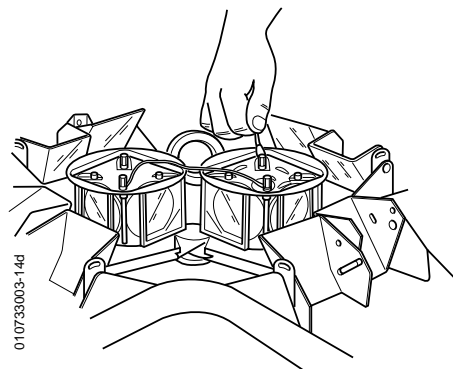


FIG. 4

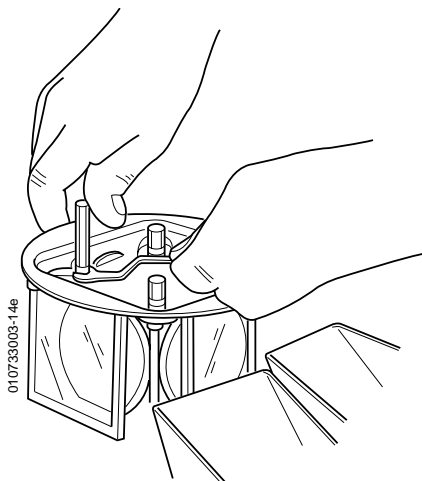


FIG. 5

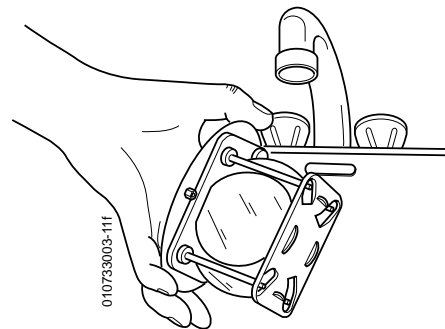


FIG. 6

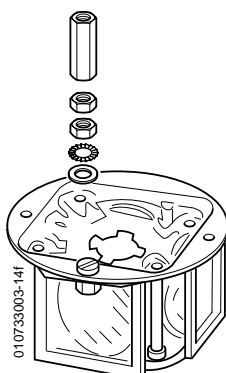


FIG. 7

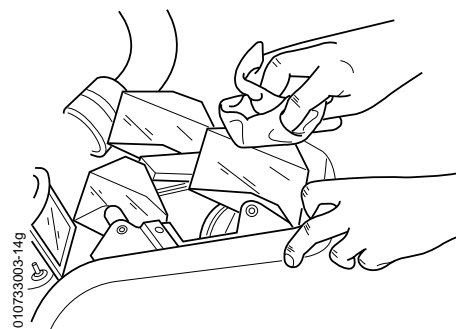


FIG. 8

010733103-3

7 - NETTOYAGE INTERNE DU PROJECTEUR AX14

- 1) Retirer le capot central (FIG. 1).
- 2) Dévisser les 8 vis imperdables et retirer le grand capot supérieur (FIG. 2).
Nettoyer un bloc optique à la fois.
- 3) Retirer le support de lampe (FIG. 3).
- 4) Déconnecter les 2 fils sur le bloc optique (FIG. 4).
- 5) Dévisser les 4 écrous et contre-écrous, ôter les 2 rondelles éventail et les 2 rondelles de centrage (FIG. 5).
- 6) Retirer le bloc optique.
ATTENTION : Repérer le sens de montage.
- 7) Passer le bloc optique sous l'eau chaude ou le tremper dans l'eau chaude, puis le sécher avec de l'air comprimé (FIG. 6).
- 8) Repositionner le bloc optique sur les 2 tiges filetées en veillant à ce qu'il soit en appui correct sur son support (FIG. 7).
 - Remettre les rondelles de centrage et éventail.
 - Bloquer les 2 premiers écrous sur les rondelles avec les doigts.
 - Bloquer les contre écrous.
- 9) Recommencer ces opérations avec le deuxième bloc optique.
- 10) Nettoyer les miroirs et les hublots à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution alcoolisée à moins de 20% (FIG. 8).

7 - INTERNAL CLEANING OF AX14 LIGHTHEAD

- 1) *Remove the central cover (FIG. 1).*
- 2) *Unscrew the 8 screws and remove the upper casing (FIG. 2).*
Clean one optical block at a time.
- 3) *Remove the bulbholder (FIG. 3).*
- 4) *Disconnect the 2 wires on the optical block (FIG. 4).*
- 5) *Unscrew the 4 nuts and counter nuts, remove the 2 notched washers and the 2 centering washers (FIG. 5).*
- 6) *Remove the optical block.*
CAREFUL: Check original positioning.
- 7) *Rinse the optical block under warm water or dip it in a rinsing bath, then dry it thanks to compressed air (FIG. 6).*
- 8) *Put back the optical block in position on the 2 threaded rods and check it is fixed properly on its support (FIG. 7).*
 - *Replace the centering washers and the notched washers.*
 - *Tighten the 2 nuts on the washers with the fingers.*
 - *Tighten the counter nuts.*
- 9) *Repeat these operations with the second optical block.*
- 10) *Clean the mirrors and the ports thanks a lintfree cloth and a 20% solution of alcohol (FIG. 8).*

7 - INNENREINIGUNG DER AX14- OPERATIONSLEUCHTEN

- 1) Die zentrale Abdeckhaube entfernen (Abb.1).
- 2) Die 8 unverlierbaren Schrauben losschrauben. Die grössere Oberabdeckung (Abb. 2) herausnehmen.
Nacheinander die optischen Blocks reinigen.
- 3) Die Lampenhalterung entfernen (Abb. 3).
- 4) Beide Drähte vom optischen Block abklemmen (Abb. 4).
- 5) Die 4 Muttern und Gegenmutter losschrauben, beide Fächerscheiben und beide Zentrierscheiben, herausnehmen. (Abb.5)
- 6) Den optischen Block entfernen.
ACHTUNG: Die Montageweise merken (Abb. 5).
- 7) Den optischen Block unter warmes Wasser halten oder ihn in warmes Wasser tauchen und mit Druckluft trocknen (Abb. 6).
- 8) Den optischen Block erneut auf beide Gewindeschrauben einsetzen. Sich vergewissern, dass er richtig auf seiner Halterung sitzt (Abb. 7)
 - Die Zentrier- und Fächerscheiben erneut einlegen.
 - Die 2 ersten Muttern mit den Fingern auf die Scheiben setzen.
 - Die Gegenmuttern festziehen.
- 9) Diesen Arbeitsschritt erneut für den zweiten optischen Block durchführen.
- 10) Die Spiegel und Luken mit einem weichen Tuch mit leicht alkoholisiertem Mittel imprägniert (höchstens 20 %), reinigen (Abb. 8).

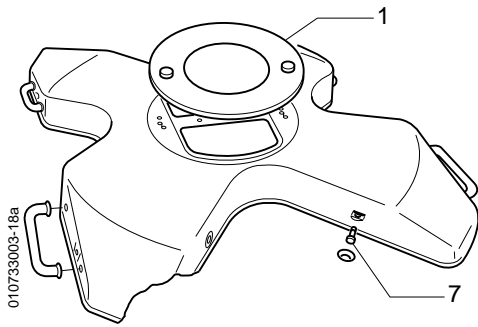


FIG. 1

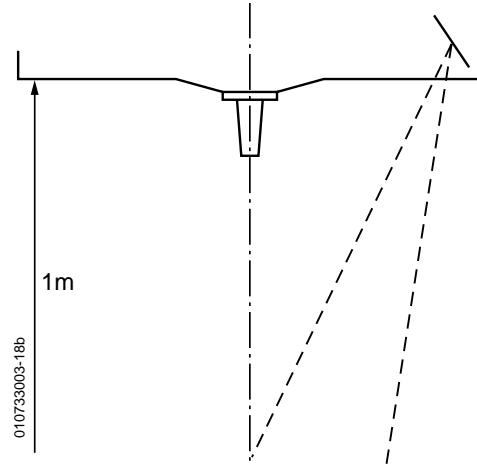


FIG. 2

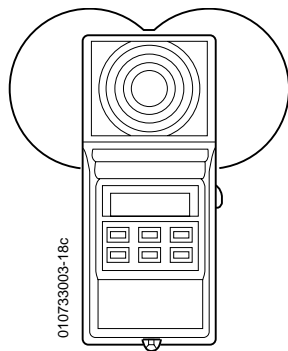


FIG. 3

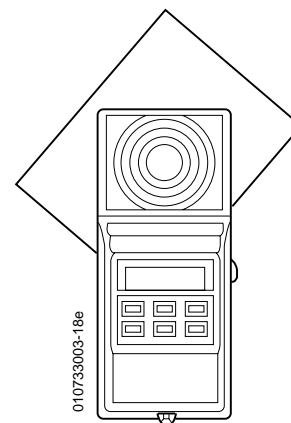
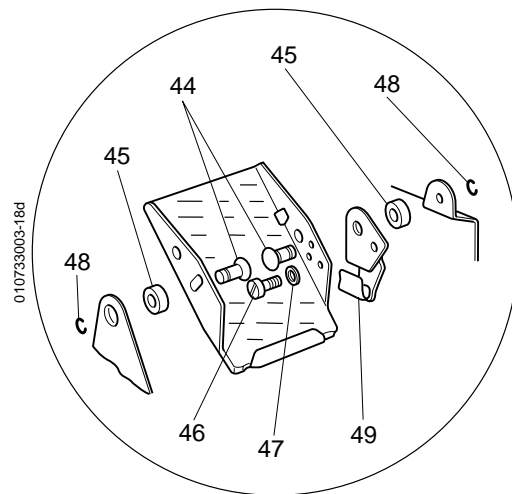


FIG. 4

010733103-3

**8 - PROCEDURE DE
REGLAGE DES MIROIRS
D'AX14**

OUTILLAGE NECESSAIRE :

- 1 tournevis
- 1 mètre
- 13 caches en carton
- 1 luxmètre
- 2 clés plates de 10
- 1 clé alène de 2,5

- 1) Retirer le capot central n°1 (FIG. 1). Dévisser les 8 vis imperdables n°7 du grand capot et les faire prendre de quelques tours sur le capot. Retirer le grand capot.
- 2) Positionner le projecteur à 1 m d'un plan horizontal (FIG. 2). Obturer les 12 hublots à l'aide de cache en carton. Vérifier le bon positionnement des lampes sur leur support ainsi que les supports sur leur bloc optique respectif.
- 3) Mettre sous tension. Optimiser la plage d'éclairage de 2 spots centraux en superposant le mieux possible les plages correspondantes. On l'obtient en tournant chaque support de lampe de 180° ou en les changeant de bloc optique (FIG. 3). Avec la cellule du luxmètre, chercher le point où l'éclairage est le plus élevé. Pour la suite des opérations, ne plus déplacer le cellule du luxmètre. Obturer les 2 faisceaux centraux avec des caches en carton.
- 4) Régler chacun des 8 miroirs fixes par centrage de leur faisceau respectif sur la cellule de luxmètre (FIG. 4).

Procéder comme suit :

- a) enlever le cache d'un hublot.
- b) débloquer les écrous n° 45 et la vis n° 46 à l'aide de 2 clés plates de 10 et d'une clé alène de 2,5.
- c) centrer le faisceau sur la cellule.
- d) rebloquer les écrous et vis.
- e) remettre le cache sous le miroir réglé.
- f) répéter cette opération pour les 8 miroirs fixes.

**8 - ADJUSTMENT
PROCEDURE FOR THE
AX14 MIRRORS**

NECESSARY TOOLS:

- 1 screwdriver
- 1 measuring tape
- 13 cardboard masks
- 1 luxmeter
- 2 wrench lf 10mm
- 1 "Alen key" of 2.5mm

- 1) Remove the central cover nr 1 (FIG. 1). Unscrew the 8 unloseable screws nr 7 of the upper casing. Remove the upper cover.
- 2) Position the projector at 1m from a flat, horizontal, surface (FIG. 2). Block the 12 windows with the cardboard masks. Check the positioning of the bulbs on their support as well as of the supports on their optical block.
- 3) Switch on the light. Optimize the illumination area given by the 2 central spots overlapping as much as possible the corresponding discrete patches. This can be obtained by turning 180° each lamp holder by placing them in the opposite (FIG. 3) Thanks to cell of the luxmeter determine the brightest point and do not move the cell until the full completion of the adjustment procedure. Block the 2 central spots with the cardboard masks.
- 4) Focus individually the 8 fixed mirrors on the luxmeter cell (FIG. 4).

Proceed as follows:

- a) remove the mask from the first window.
- b) unscrew the nuts nr 45 and the screw nr 46.
- c) center the spot on the cell.
- d) tight bolts and screws.
- e) replace the mask under the adjusted mirror.
- f) repeat this operation for the 8 fixed mirrors.

**8 -
EINSTELLUNGSVERFAHREN
DER AX14-SPIEGEL**

NÖTIGE WERKZEUGE :

- 1 Schraubenzieher
- 1 Metermaß
- 13 Sichtabdeckung aus Karton
- 1 Luxmeter
- 2 10-mm-Schlüssel
- 1 2,5 mm-Inbusschlüssel

- 1) Die zentrale Abdeckhaube entfernen (Abb.1). Die 8 unverlierbaren Schrauben Nr. 7 von der größeren Abdeckung losschrauben; sie dann leicht anziehen (Manuell, ein paar Mal die Schraube drehen). Die größeren Oberabdeckung herausnehmen.
- 2) Die Operationsleuchte auf 1 m einer waagerechten Ebene einstellen. (Abb.2) Die 12 Luken mit Kartonabdeckungen abdecken. Sich vergewissern, dass die Lampen richtig auf deren Halterung sitzen und deren Halterung auf dem optischen Block.
- 3) Spannung einschalten. Den Beleuchtungsbereich zweier Mittelspots durch ein so gut wie mögliches Überlagern der bezüglichen Bereiche optimieren. Dies wird erreicht durch eine 180°-Drehung der Lampenhalterung oder wenn man sie auf einem anderen optischen Block setzt. Den Höchsterleuchtungspunkt mit der Luxmeterzelle ausfindig machen.
- 4) Die 8 festliegenden Spiegel durch Zentrieren deren Lichtbündel auf der Luxmeterzelle, einzeln einstellen (Abb.4).
Dazu die folgenden Arbeitsschritte durchführen :
 - a) Die Kartonabdeckung einer Luke entfernen.
 - b) Die Muttern Nr.45 und die Schraube Nr. 46 mit zwei 10-mm-Schlüssel und einem 2,5-mm-Inbusschlüssel lösen.
 - c) Das Lichtbündel auf der Zelle zentrieren.
 - d) Die Muttern und Schrauben erneut festziehen.
 - e) Die Abdeckung unter den eingestellten Spiegel erneut auflegen.
 - f) Diesen Arbeitsschritt für alle 8 festliegenden Spiegel wiederholen.

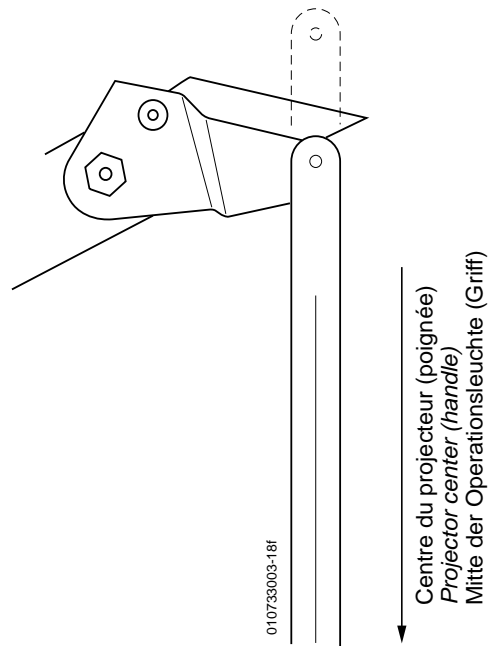


FIG. 5

- 5) Régler les 4 miroirs mobiles :
- a)** retirer le cache d'un miroir mobile.
 - b)** tourner la poignée de focalisation et amener la biellette servant à l'articulation du miroir en limite de course côté centre du projecteur (FIG. 5).
 - c)** ne pas toucher la poignée pendant toute la suite du réglage.
 - d)** procéder ensuite de façon identique au réglage des miroirs fixes et répéter l'opération pour les 4 miroirs mobiles.
- Enlever les caches des 4 miroirs mobiles et vérifier qu'ils se déplacent de façon simultanée et régulière.
- 6) Retirer tous les caches.
Focaliser au centre et affiner le centrage si nécessaire ; la plage d'éclairage doit être homogène et régulière.

- 5) *Adjust the 4 mobile mirrors:*
- a)** *remove the mask from the first moving mirror window.*
 - b)** *turn the focusing handle and bring the connecting-rod used for mirror articulation (see drawing) in limit of motion when moving toward the center of the lighthouse (FIG. 5).*
 - c)** *do not touch the handle until full completion of the adjustment.*
 - d)** *then proceed in the same way with the adjustment of the fixed mirrors and repeat the operation for the 4 moving mirrors.*
- Remove the masks from the 4 moving mirrors windows and check they are moving simultaneously and regularly.*
- 6) *Remove all the masks.*
Focus on the center and reajust the centering if necessary; the illuminated area must be homogeneous and regular.

- 5) Einstellung der 4 mobilen Spiegel:
- a)** Die Abdeckung eines mobilen Spiegels entfernen.
 - b)** Den Fokussierungsknopf drehen um die zur Bewegung des Spiegels dienende Stange zur Endlage, auf der Mitte der Operationsleuchte, zu bringen (Abb. 5).
 - c)** Den Schalter nicht mehr berühren solange die Einstellung nicht fertig ist.
 - d)** Auf dieselbe Art und Weise die festliegenden Spiegel einstellen dann denselben Arbeitsschritt für die 4 mobilen Spiegel durchführen.
- Die Abdeckungen der 4 mobilen Spiegeln entfernen und sich vergewissern, dass sie sich gleichmäßig sich zusammen bewegen.
- 6) Die gesamten Abdeckungen entfernen.
Auf die Mitte fokussieren und wenn nötig, das Zentrieren verfeinern. Der Beleuchtungsbereich soll homogen und gleichmässig sein.

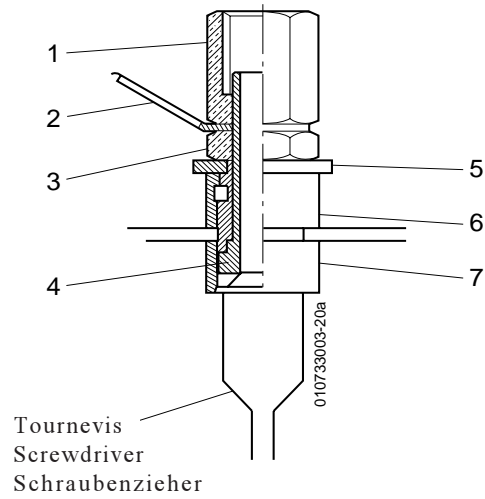


FIG. 1

9 - CHANGEMENT DES DOUILLES SUR LE BLOC OPTIQUE

Numéro du sous-ensemble douille : 174723.

- 1) Retirer le bloc optique.
ATTENTION : Repérer le sens du montage.
- 2) Se reporter au schéma (FIG. 1) pour le changement des douilles.
 - a) Dévisser l'écrou (1) à l'aide de deux clés plates de 8 mm. Retirer l'écrou et la languette (2).
 - b) Engager un tournevis à lame (largeur ≈ 7mm) dans le bloc optique par l'orifice situé à l'opposé de la douille à changer. Débloquer l'écrou (3).
 - c) Oter l'écrou (3), la rondelle (5), les douilles isolantes (6) et (7) ainsi que la partie inférieure de la douille.
 - d) Engager une nouvelle douille isolante (7) et une nouvelle douille (4) entre les lentilles du bloc optique. Pour la mise en place de ces deux pièces dans le flasque supérieur, il est possible de s'aider d'une fine tige.
 - e) Ensuite remonter les pièces supérieures.
- 3) Remettre le bloc optique en place.

9 - REPLACEMENT OF THE PLUGS ON THE OPTICAL BLOC

Reference number of the plugs assy: 174723.

- 1) Remove the optical block.
CAREFUL: Check original positioning.
- 2) For the replacement of the plugs, refer to the diagram (FIG. 1).
 - a) Unscrew the nut (1) thanks two 8 mm flat wrenches. Remove the nut and the contact tab (2).
 - b) Introduce a screw driver through a hole located in the inferior shell of the optical block, in order to reach the nut (3) and to unscrew it.
 - c) Remove the nut (3), the washer (5), the insulating sockets (6) and (7) and the inside shaft of the plug.
 - d) Place a new insulating socket (7), then a new shaft (4) into the superior shell of the optical block, routing them upwards through the lenses by means of a rod.
 - e) Then put back upper pieces.
- 3) Put in place the optical block.

9 - AUSWECHSELN DER BUCHSEN AUF DEM OPTISCHEN BLOCK

Bezugs-Nr. Der Buchsen-Baugruppe : 174723.

- 1) Den optischen Block entfernen.
ACHTUNG: Die Montageweise merken.
- 2) Zum Auswechseln der Buchsen, siehe Zeichnung (Abb. 1).
 - a) Die Mutter (1) mit zwei 8-mm-Schlüsseln lösen. Die Mutter und Lasche (2) herausnehmen.
 - b) Den Schraubendreher mit Klinge (Breite ≈ 7 mm) durch das Loch, das gegenüber der auszuwechselnde Buchse liegt, in den optischen Block führen. Die Mutter (3) lösen.
 - c) Die Mutter (3), Unterlegscheibe (5), Isolierbuchsen (6) und (7) und das Unterteil der Buchse herausnehmen.
 - d) Eine neue Isolierbuchse (7) und eine neue Buchse (4) zwischen die Linsen des optischen Blocks einsetzen. Ein feiner Stab ermöglicht es sie besser hereinzusetzen.
 - e) Die oberen Teile erneut montieren.
- 3) Den optischen Block erneut einsetzen.

**10 - NOMENCLATURES
ET PLANCHES**

***10 - PARTS LISTS AND
DRAWINGS***

**10 - STÜCKLISTE UND
ZEICHNUNGEN**


NOMENCLATURE 1
PARTS LIST 1
STÜCKLISTE 1

PLANCHE 1
DRAWING 1
ZEICHNUNG 1

BRIDE RENFORÇÉE
REINFORCED FLANGE
VERSTÄRKTE FLANSCH

PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Qté Qty Mg
1A	568051999	Bride renforcée	<i>Reinforced flange</i>	Verstärkter Flansch	
10A	568009028	Platine plafonnière	<i>Ceiling plate</i>	Deckenarm-Platte	1
50A	568009013	Bride	<i>Flange</i>	Flansch	1
60A	568009043 à/to/bis 568009054	Tube de suspension	<i>Suspension tube</i>	Aufhängungsrohre	1
90A	568009018	Joint de tube ϕ 149 mm	<i>Tube seal ϕ 149 mm</i>	Röhrendichtung ϕ 149 mm	1
100A	568009014	Fourreau	<i>Sleeve</i>	Hülse	1
130A	568009016	Joint capot plafonnier	<i>Ceiling cover seal</i>	Dichtung der Deckenarm- abdeckung	1

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

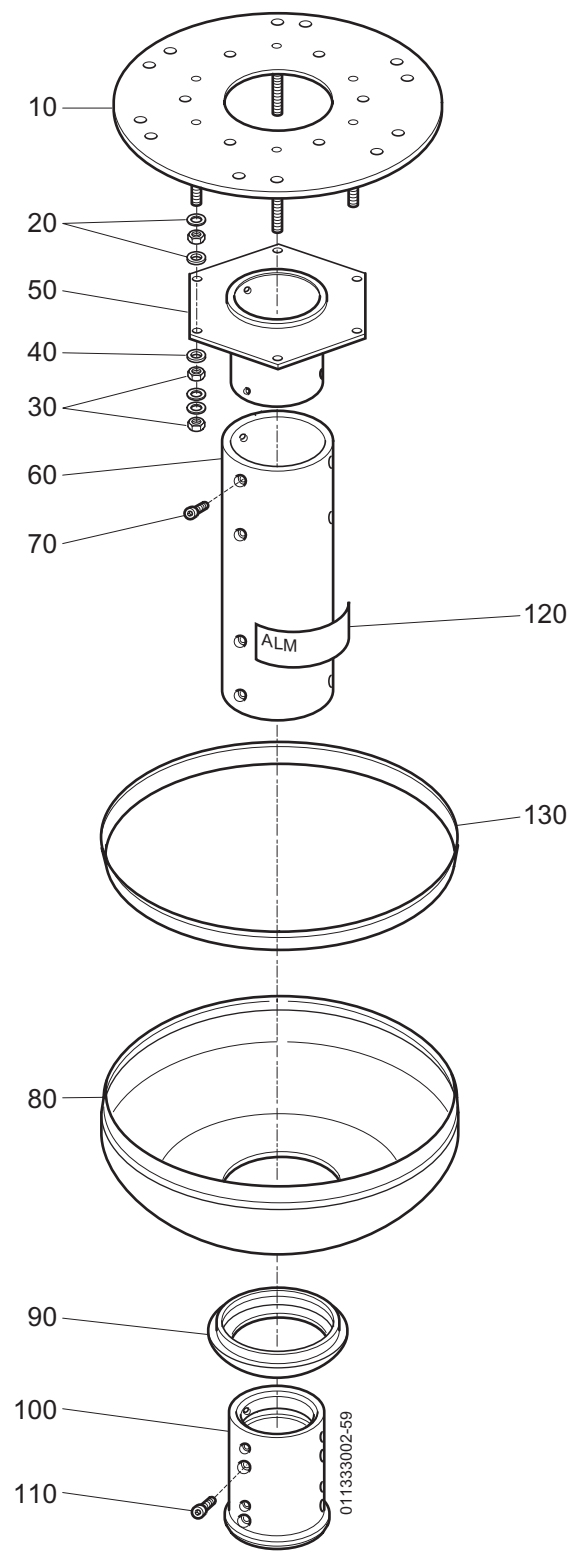

I H G F E D C B A

**BRIDE RENFORÇÉE
REINFORCED FLANGE
VERSTÄRKTER FLANSCH**

PLANCHE/DRAWING/ZEICHNUNG		1
ALM		02/00 Garreau
Modif:		
Änd:		

010733003-3


NOMENCLATURE 2
PARTS LIST 2
STÜCKLISTE 2

PLANCHE 2
DRAWING 2
ZEICHNUNG 2

BRIDE SIMPLE
PLAIN FLANGE
EINFACHER FLANSCH

PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Qté Qty Mg
1A	568051999	Bride simple	<i>Plain flange</i>	Einfacher Flansch	
10A	568009028	Platine plafonnière	<i>Ceiling plate</i>	Deckenarm-Platte	1
50A	568009011	Bride	<i>Flange</i>	Flansch	1
60A	568009035 à / to / bis 568009042	Tube de suspension	<i>Suspension tube</i>	Aufhängungsrohre	1
90A	568009017	Joint de tube ϕ 105 mm	<i>Tube seal ϕ 105 mm</i>	Röhrendichtung ϕ 105	

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

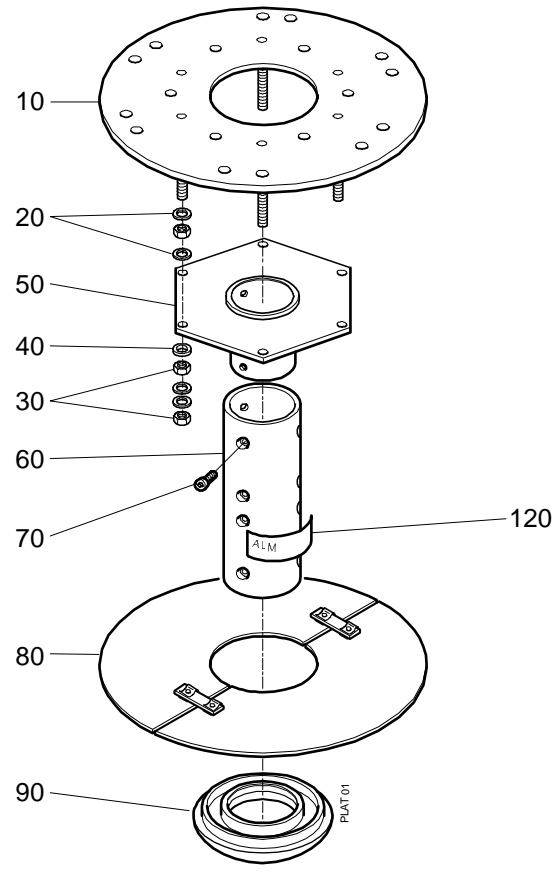

I H G F E D C B A

**BRIDE SIMPLE
PLAIN FLANGE
EINFACHER FLANSCH**

PLANCHE/DRAWING/ZEICHNUNG 2	
ALM	02/00 Garreau
Modif:	
Änd:	

010733003-3

SUPPORT DE BLOC OPTIQUE
OPTICAL ASSEMBLY SUPPORT
HALTERUNG DES OPTISCHEN BLOCKS

NOMENCLATURE 3
PARTS LIST 3
STÜCKLISTE 3

PLANCHE 3
DRAWING 3
ZEICHNUNG 3

NOUVEAU MODÈLE SANS FILTRES CATATHERMIQUES CENTRAUX
NEW MODEL WITH CENTRAL ATHERMAL FILTERS
NEUES MODELL OHNE KATATHERMISCHEN FILTERN

PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BEZEICHNUNG	Qté Qty Mg
1	950118	Ecrou M4	<i>Nut M4</i>	MutterM4	4
2	151686	Tige fixation condenseur	<i>Optical condenser attachment stud</i>	Befestigungsstange des Kondensors	6
3	137724	Lentille centrale	<i>Central lens</i>	Zentrallinse	2
4	251302	Roulement billes	<i>Ball bearing</i>	Kugellager	1
5	153235	Hublot central pour AX 10	<i>Central glass port for AX 10</i>	Mittlere Luke für AX10	2
	204897	Hublot central pour AX 14	<i>Central glass port for AX 14</i>	Mittlere Luke für AX14	2
6	204548	Entretoise	<i>Spacer</i>	Abstandsstück	6
7	185875	Vis	<i>Screw</i>	Schraube	6
8	125335	Ensemble de focalisation	<i>Focusing assembly</i>	Baugruppe der Fokussierung	1


NOMENCLATURE 3
PARTS LIST 3
STÜCKLISTE 3

PLANCHE 3
DRAWING 3
ZEICHNUNG 3


ANCIEN MODÈLE SANS FILTRES CATATHERMIQUES CENTRAUX
OLD MODEL WITHOUT CENTRAL ATHERMAL FILTERS
VORMALS MODELL OHNE ZENTRALEN
KATATHERMISCHEN FILTERN

PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ.	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BEZEICHNUNG	Qté Qty Mg
1	950118	Ecrou M4	<i>Nut M4</i>	MutterM4	1
2	151686	Tige fixation condenseur	<i>Optical assy. fixation stud</i>	Befestigungsstange des Kondensators	6
3	137724	Lentille centrale	<i>Central lens</i>	Zentrallinse	2
4	251302	Roulement billes	<i>Ball bearing</i>	Kugellager	1
5	125335	Ensemble de focalisation	<i>Focusing assembly</i>	Baugruppe der Fokussierung	1

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

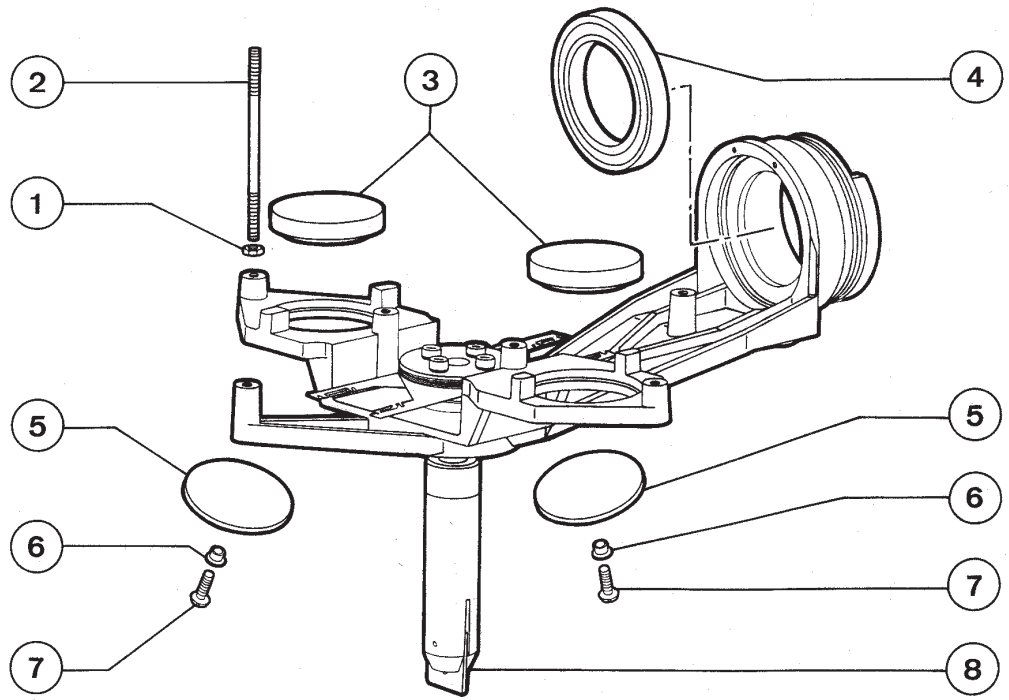

NOUVEAU MODÈLE SANS FILTRES CATATHERMIQUES CENTRAUX
 NEW MODEL WITH CENTRAL ATHERMAL FILTERS
 NEUES MODELL OHNE KATATHERMISCHE FILTER

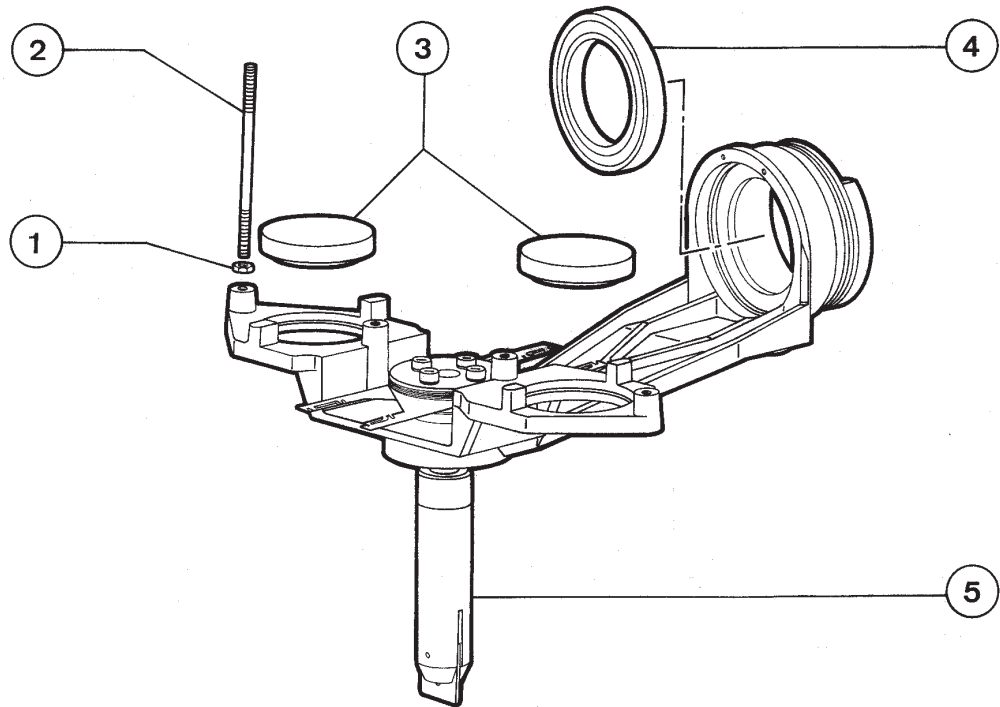

ANCIEN MODÈLE SANS FILTRES CATATHERMIQUES CENTRAUX
 OLD MODEL WITHOUT CENTRAL ATHERMAL FILTERS
 VORMALS MODELL OHNE ZENTRALE KATATHERMISCHE FILTER

I H G F E D C B A

SUPPORT BLOC OPTIQUE
OPTICAL ASSEMBLY SUPPORT
HALTERUNG DES OPTISCHEN BLOCKS

PLANCHE/DRAWING/ZEICHNUNG **3**

ALM

02/00
Garreau

Modif:

Änd:

010733003-S


NOMENCLATURE 4
PARTS LIST 4
STÜCKLISTE 4

PLANCHE 4
DRAWING 4
ZEICHNUNG 4

S/E BRAS PRINCIPAL SIMPLE SAX
S/A SINGLE MAIN ARM SAX
UNTERBAUGRUPPE DES EINFACHEN HAUPTARMS SAX

PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Qté Qty Mg
1	204820	Vis de fixation du contact mâle	Male contact fixation screw	Befestigungsschraube des Kontaktstifts	2
2	204815	Support de contact mâle	Male contact support	Auflage des Kontaktstifts	1
3	180362	Broche mâle	Male contact	Steckerstift	1
4	204823	Faisceau bras	Arm cable harness	Kabelbündel des Arms	1
5	204855	Frein du bras ressort	Spring arm brake	Bremse des Federarms	1
6	204862	Vis de fixation porte de visite	Access plate fixation screw	Befestigungsschraube der Zugangsklappe	2
7	204858	Rondelle éventail	Washer	Fächerscheibe	1
8	204826	Porte de visite	Brush assy access plate	Zugangsklappe	1
9	204821	Porte balais	Brush assembly	Bürstenarm	1
10	204824	Vis de fixation cache de protection	Protective cover fixation	Befestigungsschraube der Schutzabdeckung	3
11	204825	Cache de protection	Protective cover	Schutzabdeckung	1
12	189489	Frein d'axe central	Central axis brake	Bremse der Zentralachse	2
13	179111	Connecteur d'alimentation	Supply connector	Versorgungssteckverbinder	1
14	188396	Collier	Collar	Schelle	1
15	981328	Vis de fixation du cache	Retaining screws	Befestigungsschraube der Abdeckung	3
16	274240	Cache	Cover plate	Abdeckung	1

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

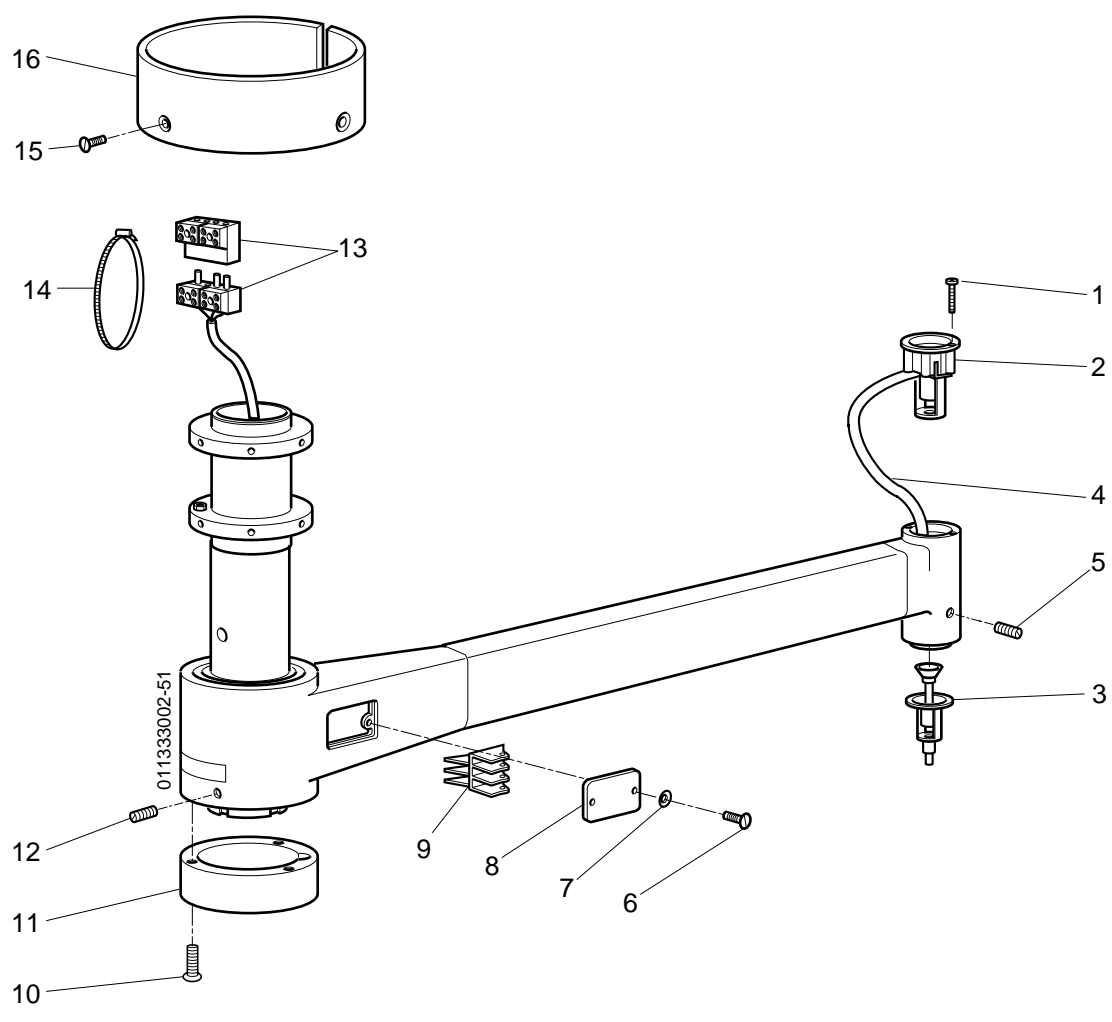

I H G F E D C B A

S/E BRAS PRINCIPAL SIMPLE SAX S/A SINGLE MAIN ARM SAX UNTERBAUGRUPPE DES EINFACHEN HAUPTARMS SAX	PLANCHE/DRAWING/ZEICHNUNG 4	
	Modif:	02/00 Garreau
	Änd:	

010733003-3


NOMENCLATURE 5
PARTS LIST 5
STÜCKLISTE 5

PLANCHE 5
DRAWING 5
ZEICHNUNG 5

S/E BRAS PRINCIPAL DOUBLE SAX
S/A DOUBLE MAIN ARM SAX
U/BG DES DOPPELTEN HAUPTARMS SAX

PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Qté Qty Mg
1	204820	Vis de fixation du contact mâle	Male contact fixation screw	Befestigungsschraube des Kontaktstifts	4
2	204815	Support de contact mâle	Male contact support	Auflage des Kontaktstifts	2
3	180362	Broche mâle	Male contact	Steckerstift	2
4	204823	Faisceau bras satellite	Outer arm cable harness	Kabelbündel des Ausgleichsarm	1
5	204855	Frein du bras ressort	Spring arm brake	Bremse des Federarms	2
6	204822	Faisceau bras central	Center arm cable harness	Bremse des mittleren Arms	1
7	204862	Vis de fixation porte de visite	Access plate fixation screw	Befestigungsschraube der Zugangsklappe	
4					
8	204858	Rondelle éventail	Washer	Fächerscheibe	2
9	204826	Porte de visite	Brush assy access plate	Zugangsklappe	2
10	204821	Porte balais	Brush assembly	Bürstenarm	2
11	204825	Cache de protection	Protective cover	Schutzabdeckung	1
12	204824	Vis de fixation cache de protection	Protective cover fixation screw	Befestigungsschraube der Schutzabdeckung	3
13	189489	Frein d'axe central	Central axis brake	Bremse der Zentralachse	4
14	179111	Connecteur d'alimentation	Supply connector	Versorgungssteckverbinder	2
15	188396	Collier	Collar	Schelle	2
16	981328	Vis de fixation du cache	Retaining screws	Befestigungsschraube der Abdeckung	3
17	274240	Cache	Cover plate	Abdeckung	1
18	187594	Rallonge 110mm	Extender 110mm	Verlängerungsrohr von 110 mm	1

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

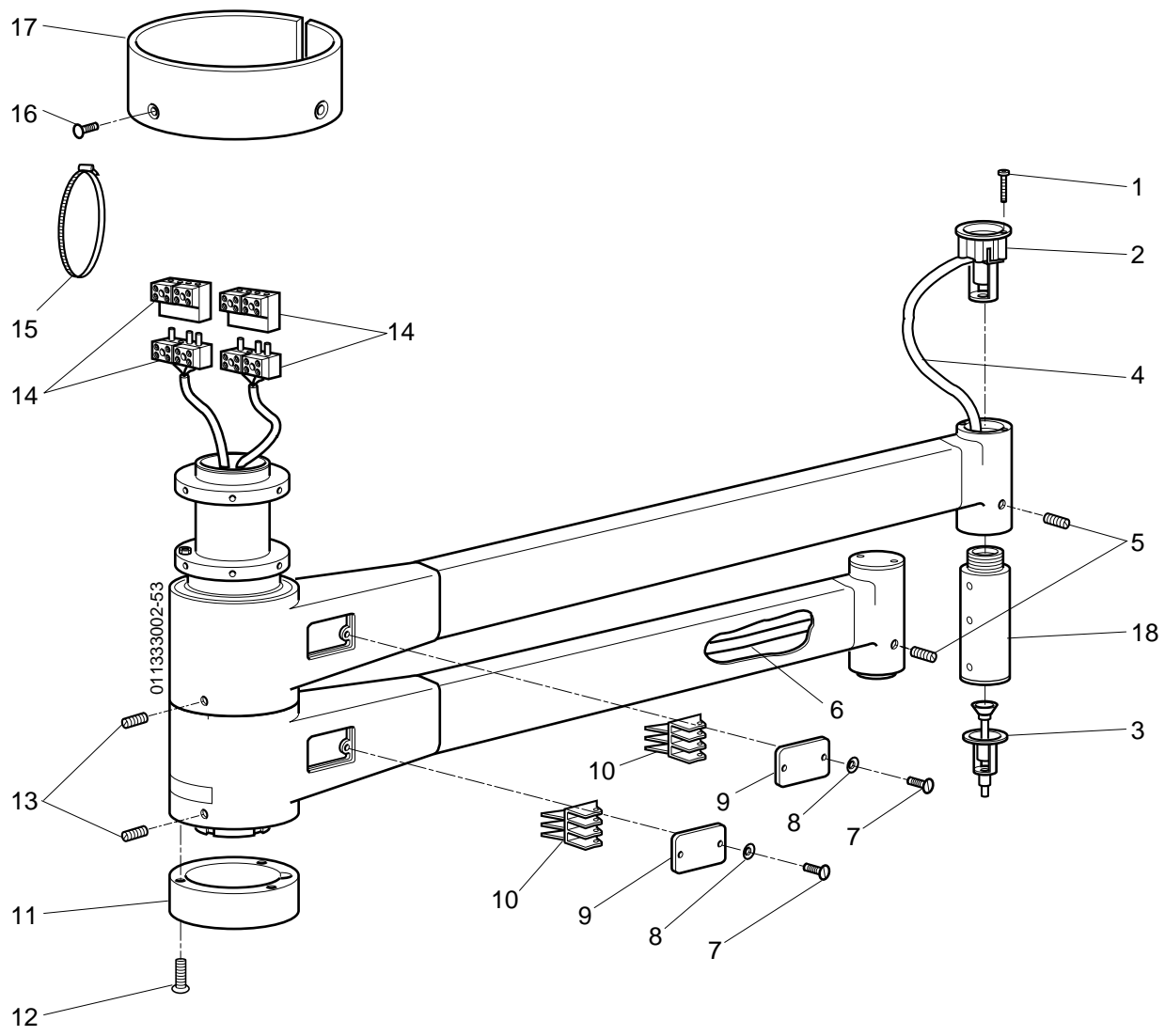

I H G F E D C B A

S/E BRAS PRINCIPAL DOUBLE SAX
S/A DOUBLE MAIN ARM SAX
U/BG DES DOPPELTEN HAUPTARMS SAX

PLANCHE/DRAWING/ZEICHNUNG		5
ALM		02/00 Garreau
Modif:		
Änd:		

010733003-3


NOMENCLATURE 6
PARTS LIST 6
STÜCKLISTE 6

PLANCHE 6
DRAWING 6
ZEICHNUNG 6

S/E BRAS PRINCIPAL TRIPLE SAX
S/A TRIPLE MAIN ARM SAX
U/BG DES DREIFACHEN HAUPTARMS SAX

PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Qté Qty Mg
1	204820	Vis de fixation du contact mâle	<i>Male contact fixation screw</i>	Befestigungsschraube des Kontaktstifts	4
2	204815	Support de contact mâle	<i>Male contact support</i>	Auflage des Kontaktstifts	2
3	180362	Broche mâle	<i>Male contact</i>	Steckerstift	2
4	204823	Faisceau bras satellite	<i>Outer arm cable harness</i>	Kabelbündel des Ausgleicharms	1
5	204855	Frein du bras ressort	<i>Spring arm brake</i>	Bremse des Federarms	2
6	204822	Faisceau bras central	<i>Center arm cable harness</i>	Kabelbündel des mittleren Arms	1
7	204862	Vis de fixation porte de visite	<i>Access plate fixation screw</i>	Befestigungsschraube der Zugangsklappe	4
8	204858	Rondelle éventail	<i>Washer</i>	Fächerscheibe	2
9	204826	Porte de visite	<i>Brush assy access plate</i>	Zugangsklappe	2
10	204821	Porte balais	<i>Brush assembly</i>	Bürstenarm	2
11	204825	Cache de protection	<i>Protective cover</i>	Schutzabdeckung	1
12	204824	Vis de fixation cache de protection	<i>Protective cover fixation screw</i>	Befestigungsschraube des Schutzabdeckung	3
13	189489	Frein d'axe central	<i>Central axis brake</i>	Bremse der Zentralachse	4
14	179111	Connecteur d'alimentation	<i>Supply connector</i>	Versorgungssteckverbinder	2
15	188396	Collier	<i>Collar</i>	Schelle	2
16	981328	Vis de fixation du cache	<i>Retaining screws</i>	Befestigungsschraube der Abdeckung	3
17	274240	Cache	<i>Cover plate</i>	Abdeckung	1
18	187594	Rallonge 110mm	<i>Extender 110mm</i>	Verlängerungsrohr von 110 mm	1
19	187597	Rallonge 220mm	<i>Extender 220mm</i>	Verlängerungsrohr von 220 mm	1

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

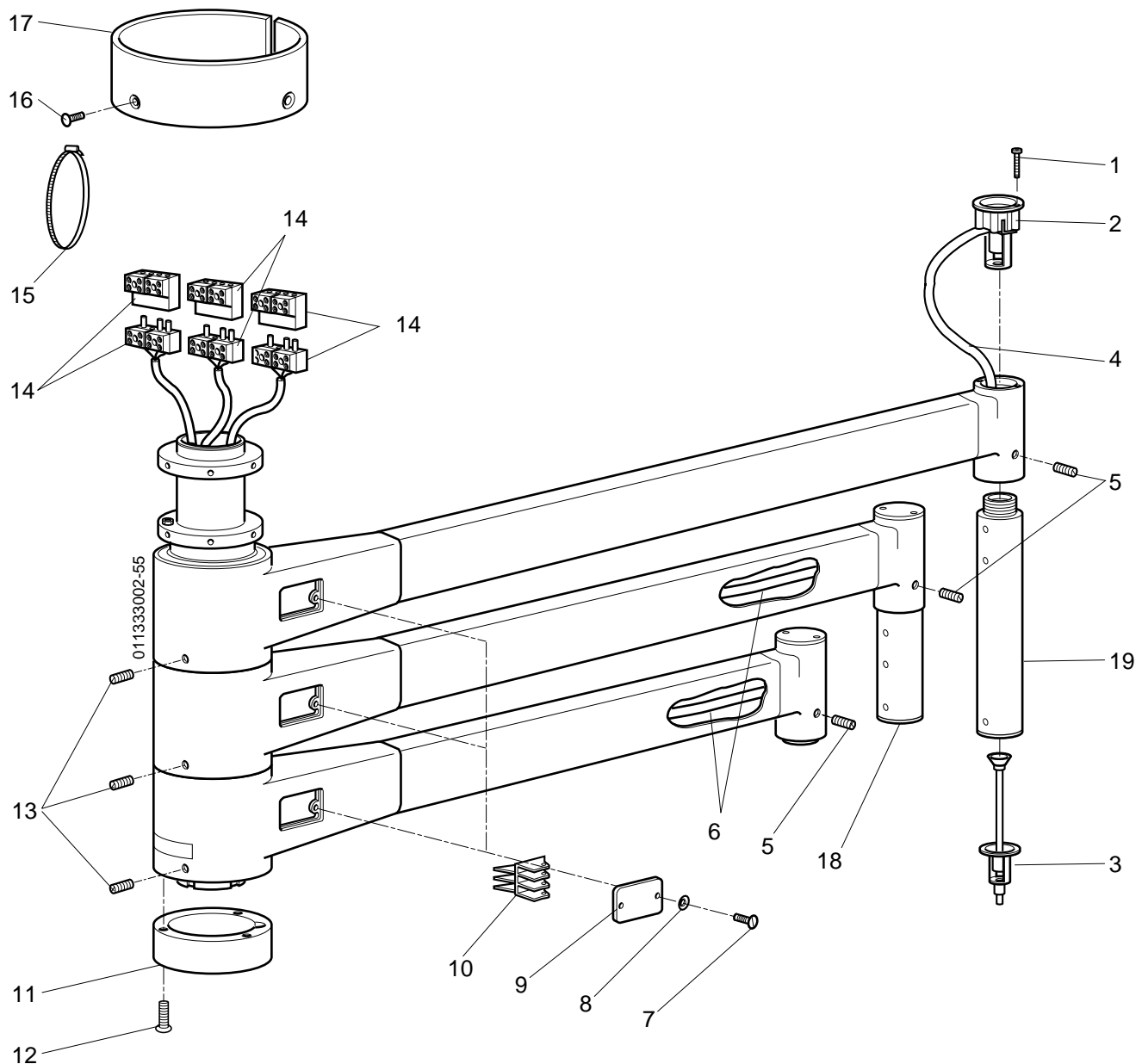

I H G F E D C B A

**S/E BRAS PRINCIPAL TRIPLE SAX
S/A TRIPLE MAIN ARM SAX
U/BG DES DREIFACHEN HAUPTARMS SAX**

PLANCHE/DRAWING/ZEICHNUNG		6
ALM		02/00 Garreau
Modif:		
Änd:		

010733003-3


NOMENCLATURE 7
PARTS LIST 7
STÜCKLISTE 7

PLANCHE 7
DRAWING 7
ZEICHNUNG 7

PROJECTEUR AX4
AX4 LIGHTHEAD
OPERATIONSLEUCHE AX4

PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Qté Qty Mg
1	186193	Capot central	<i>Bulb cover (white)</i>	Zentrale Abdeckhaube	1
2	162798	Support de lampe -150 W	<i>Bulb holder - 150 W</i>	Lampenhalterung - 150 W	1
3	163508	Lampe 150W G6.35	<i>Bulb 150W G6.35</i>	Glühlampe 150 W G6.35	1
4	187465	Bloc optique	<i>Optical block</i>	Optischen Block	1
5	986118	Vis CHc M3 - 10	<i>Screw CHc M3 -10</i>	Schraube CHc M3 - 10	4
6	971078	Rondelle DE3	<i>Washer DE3</i>	Scheibe DE3	4
7/8	130782	Capot bras	<i>Arm cover</i>	Verkleidung des Arms	4
9	104857	Poignée	<i>Non sterile handle</i>	Griff	1
10	971045	Rondelle DE 4	<i>Washer DE 4</i>	Scheibe DE4	2
11	981418	Vis CBL M4 - 10	<i>Screw CBL M4 - 10</i>	Schraube CBL M4 - 10	2
12	153627	Vis de fixation capot	<i>Lighthouse casing screw</i>	Befestigungsschraube der Abdeckhaube	4
13	153513	Cache vis	<i>Screw cover</i>	Schraubenabdeckung	4
14	130779	Bras	<i>Arm</i>	Arm	2
15	130780	Bras porte palier	<i>Arm (side)</i>	Arm, Lagerträger	2
16	981418	Vis CBL M 4 - 10	<i>Screw CBL M 4 - 10</i>	Schraube CBL M4 - 10	20
17	180247	S/ensemble arceau équipé	<i>C - arm sub-assy.</i>	Unterbaugruppe des bestückten Bügels	1
18	193128	S/ensemble pièces bout d'arceau	<i>Yoke end sub-assy.</i>	Unterbaugruppe der Teile am Bügelende	2
19	104061	Frein	<i>Spring</i>	Sicherung	2
20	174723	Douille panneau	<i>Bulb holder socket assy.</i>	Buchse, Paneel	2
22	984678	Vis FHc M 4 - 16	<i>Screw FHc M 4 - 16</i>	Schraube FHc M4 - 16	4
23	950118	Ecrou H M4	<i>Nut H M4</i>	Mutter HM4	4
24	984948	Vis FHc M 5 - 14	<i>Screw FHc M 5 -14</i>	Schraube FHc M5 - 14	8
25	950228	Ecrou H M5	<i>Nut H M5</i>	Mutter HM5	8
26	180233	Faisceau de tête AX 4	<i>Cable harness AX 4</i>	Kopf-Kabelbündel AX 4	1
27	110519	Joint torique	<i>Arm seal</i>	Dichtungsring	4
28	187306	Poignée stérilisable	<i>Sterilisable handle</i>	Sterilisierbarer Griff	1
29	158989	Support inférieur	<i>Outer lower glass port retainer</i>	Untere Halterung	4

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

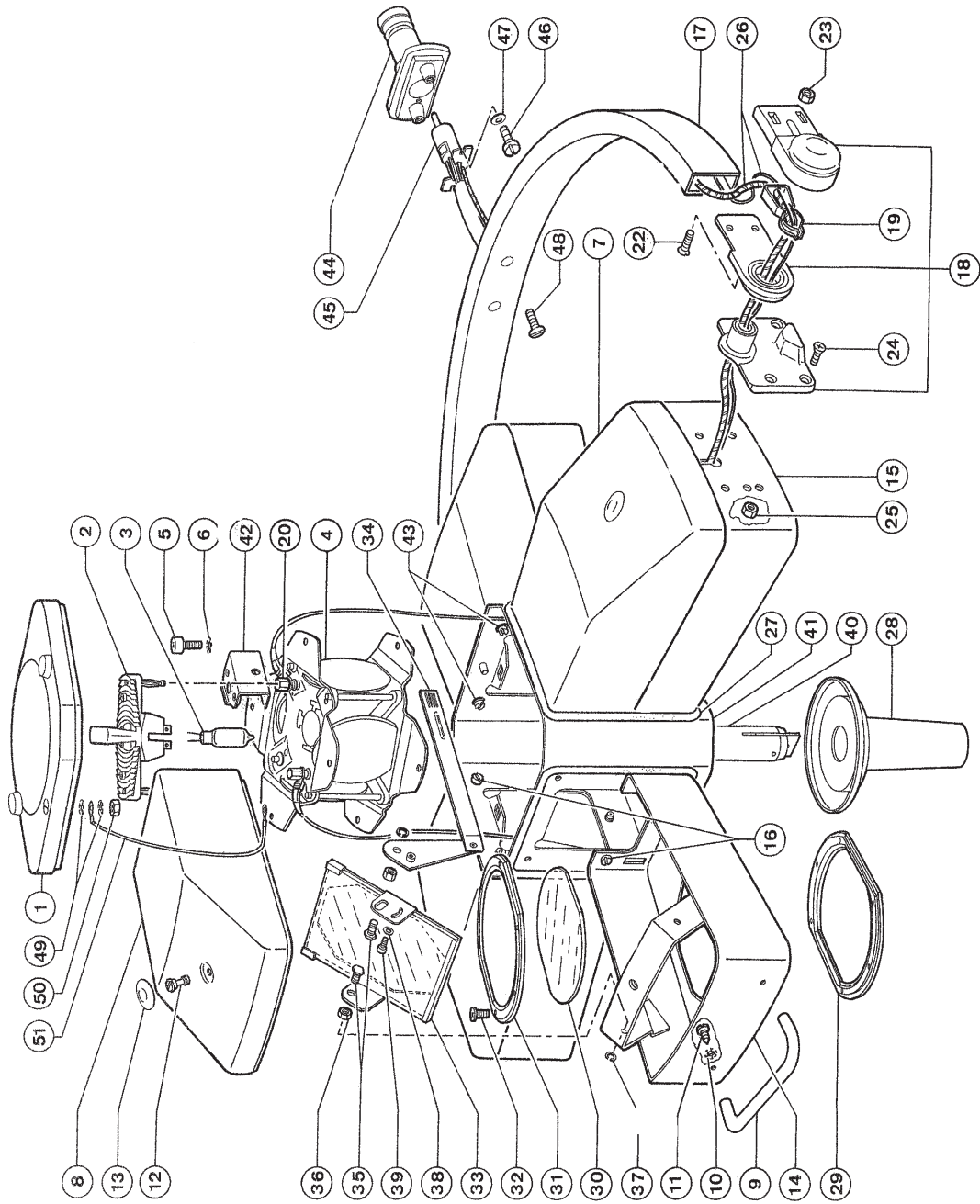

I H G F E D C B A

**PROJECTEUR AX4
AX4 LIGHTHEAD
OPERATIONSLEUCHTE AX4**

PLANCHE/DRAWING/ZEICHNUNG **7**

ALM

02/00
Garreau

Modif:

Änd:

010733003-3


NOMENCLATURE 7
PARTS LIST 7
STÜCKLISTE 7

PLANCHE 7
DRAWING 7
ZEICHNUNG 7

PROJECTEUR AX4
A 4 LIGHTHEAD
OPERATIONSLEUCHTE AX4

PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Qté Qty Mg
30	205326	Hublot micro lentilles	Outer glass port micro lenses	Luke der Mikrolinsen	4
31	160175	Support supérieur	Outer upper glass port retainer	Obere Halterung	4
32	909130	Vis autotaraudeuse M 4 - 9	Screw M 4 - 9	Schneidschraube M4 - 9	24
33	135976	Sous-ensemble miroir collé	Dichroic mirror	Unterbaugruppe des geklebten Spiegels	4
34	104188	Levier-bielle sertie	Focus lever	Hebel - Stange, gefalzt	4
35	77690	Axe support de miroir	Mirror axis pin	Halterungsachse des Spiegels	8
36	77691	Ecrou	Axis pin nut	Mutter	8
37	921380	Anneau 7103	Spring clip 7103	Ring 7103	8
38	971068	Rondelle M 3 U	Washer M 3 U	Scheibe M3 U	4
39	986148	Vis CHc M 3 - 6	Screw CHc M 3 - 6	Schraube CHc M3 - 6	4
40	105209	Ensemble de focalisation	Focusing assy.	Baugruppe der Fokussierung	1
41	130781	Fût	Centre housing	Schaft	1
42	186468	Porte ressort équipé	Spring holder assy.	Federhalterung, bestückt	2
43	971048	Rondelle DE 4	Washer DE 4	Scheibe DE4	8
44	113460	Moyeu	Axis	Nabe	1
45	270602	Broche mâle	Male plug	Steckerstift	1
46	981448	Vis CL M 3 - 10	Screw CL M 3 - 10	Schraube CL M3 - 10	2
47	971068	Rondelle M 3 U	Washer M 3 U	Scheibe M 3 U	2
48	185404	Vis RL M5 - 16	Screw RL M5 - 16	Schraube RL M5 - 16	2
49	971048	Rondelle dentée DE 4	Washer DE 4	Zahnscheibe DE 4	2
50	950118	Ecrou M4	Nut M4	MutterM4	1

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

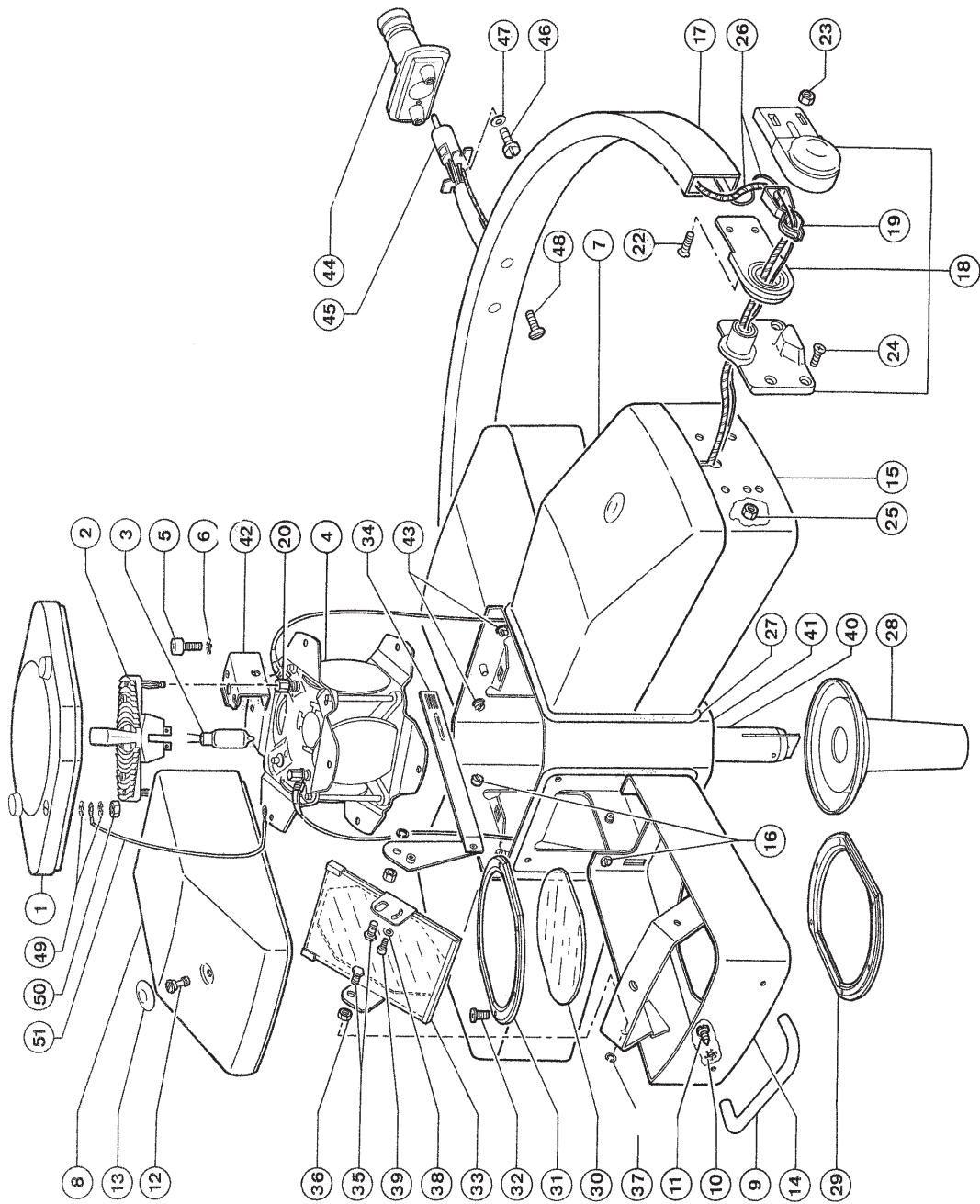

I H G F E D C B A

**PROJECTEUR AX4
AX4 LIGHTHEAD
OPERATIONSLEUCHTE AX4**

PLANCHE/DRAWING/ZEICHNUNG **7**

ALM

02/00
Garreau

Modif:

Änd:

010733003-3


NOMENCLATURE 8
PARTS LIST 8
STÜCKLISTE 8

PLANCHE 8
DRAWING 8
ZEICHNUNG 8

BRAS D'ÉQUILIBRAGE AX14
BALANCE ARM AX14
AUSGLEICHARM AX14

PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Qté Qty Mg
1	180363	Fiche femelle	<i>Female plug</i>	Steckdose	1
2	204819	Circlips	<i>Retaining clip</i>	Sicherungsring	1
3	204816	Rondelle de friction	<i>Friction washer</i>	Spannscheibe	
4	204817	Rondelle d'appui	<i>Spacer</i>	Unterlegscheibe	2
5	204861	Vis de fixation fiche femelle	<i>Female plug fixation screw</i>	Befestigungsschraube der Steckdose	1
6	204850	Cache de réglage débattement	<i>Maximum height adjustment cover</i>	Abdeckung der Schwenkeinstellung	1
7	204849	Languette de protection	<i>Dust plate</i>	Schutzlasche	1
8	204867	Verrou	<i>Safety bolt</i>	Riegel	1
9	204845	Vis de fixation du verrou	<i>Safety bolt fixation screw</i>	Befestigungsschraube des Riegels	1
10	204864	Vis de fixation fiche femelle	<i>Female plug fixation screw</i>	Befestigungsschraube der Steckdose	1
11	113567	Secteur	<i>Retaining clip</i>	Bogenstück	1
12	113568	Bague de verrouillage	<i>Retaining collar</i>	Verriegelungsring	1
13	180363	Fiche femelle	<i>Female plug</i>	Steckdose	1
14	274368	Demi cache	<i>Hemi cover</i>	Halb-Abdeckung	2
15	274369	Vis de fixation du cache	<i>Protective cover fixation screw</i>	Befestigungsschraube der Abdeckung	2
16	204842	Vis d'arrêt bague de verrouillage	<i>Retaining collar screw</i>	Anschlagschraube des Verriegelungsring	1

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

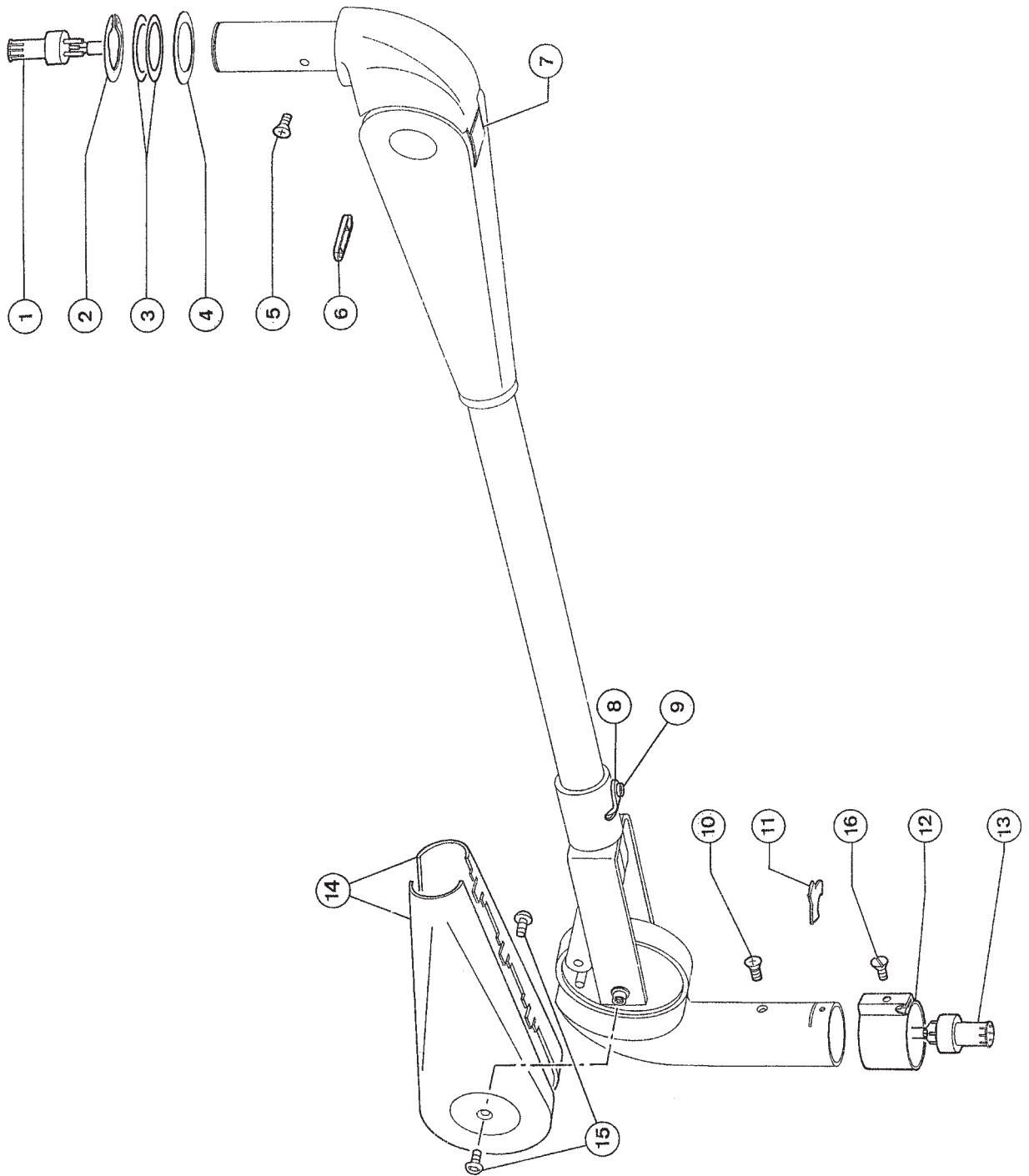

I H G F E D C B A

BRAS D'ÉQUILIBRAGE AX14
BALANCE ARM AX14
AUSGLEICHARM AX14

PLANCHE/DRAWING/ZEICHNUNG		8
ALM		02/00 Garreau
Modif:		
Änd:		

010733003-3


NOMENCLATURE 9
PARTS LIST 9
STÜCKLISTE 9

PLANCHE 9
DRAWING 9
ZEICHNUNG 9

PROJECTEUR AX14
AX14 LIGHTHEAD
OPERATIONSLEUCHE AX14

PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Qté Qty Mg
1	125330	Capot central équipé	<i>Bulb cover</i>	Zentrale Abdeckhaube, bestückt	1
2	153093	Joint capot	<i>Bulb cover seal</i>	Dichtung, Abdeckhaube	1
3	125329	Grand capot équipé	<i>Upper casing</i>	Große Abdeckung, bestückt	1
4	137704	Poignée	<i>Non sterile handle</i>	Griff	4
5	909107	Vis autotaraudeuse M4 - 8	<i>Screw M4 - 8</i>	Schneidschraube M4 - 8	8
6	154241	Joint capot	<i>Cover seal</i>	Dichtung, Abdeckhaube	1
7	153627	Vis fixation capot	<i>Lighthouse casing screw</i>	Befestigungsschraube, Abdeckhaube	8
8	153513	Cache vis	<i>Screw cover (silicone)</i>	Schraubenabdeckung	8
9	162798	Support lampe	<i>Bulb holder - 150W</i>	Lampenhalterung	2
10	163508	Lampe 150 W G6.35	<i>Bulb 150 W G6.35</i>	Glühlampe 150 W G6.35	2
11	187465	Bloc optique	<i>Optical block</i>	Optischer Block	2
12	204582	Hublot central	<i>Centre glass port</i>	Luke, mittlere	2
13	270590	Arrêtoir	<i>Athermal filter holder</i>	Sperre	16
14	156153	Hublot catathermique	<i>Athermal filter</i>	Luke, katathermisch	8
15	174723	Douille panneau	<i>Bulb holder socket assy.</i>	Buchse, Paneel	
16	950118	Ecrou H M4	<i>Nut H M4</i>	Mutter H M4	8
17	971048	Rondelle DE 4	<i>Washer DE 4</i>	Scheibe DE4	4
18	139026	Entretoise	<i>Centering washer</i>	Abstandstück	4
19	204866	Vis de fixation fiche femelle	<i>Female plug fixation screw</i>	Befestigungsschraube, Steckdose	1
20	204863	Vis de fixation bague de verrouillage	<i>Retaining collar fixation screw</i>	Befestigungsschraube, Verriegelungsring	1
21	204833	Bague de verrouillage	<i>Retaining collar</i>	Verriegelungsring	1
22	205098	Faisceau	<i>Cable harness</i>	Kabelbündel	1
23	138495	Joint	<i>Seal</i>	Dichtung	1
24	204814	Frein d'arceau	<i>Yoke break</i>	Bügelbremse	1
25		Manchon	<i>Sleeve</i>	Muffe	
26	125328	Base équipée	<i>Lower casing</i>	Sockel, bestückt	1
27	158989	Support inférieur	<i>Outer lower glass port retainer</i>	Halterung, untere	4
28	205326	Hublot extérieur micro lentilles	<i>Outer glass port micro lenses</i>	Luke , außen, Mikrolinsen	4
29	160175	Support supérieur	<i>Outer upper glass port retainer</i>	Halterung, obere	4
30	158990	Support inférieur	<i>Inter. lower glass port retainer</i>	Halterung, untere	4
31	205325	Hublot intermédiaire micro lentilles	<i>Intermediate glass port micro lenses</i>	Luke, zwischen Mikrolinsen	4

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

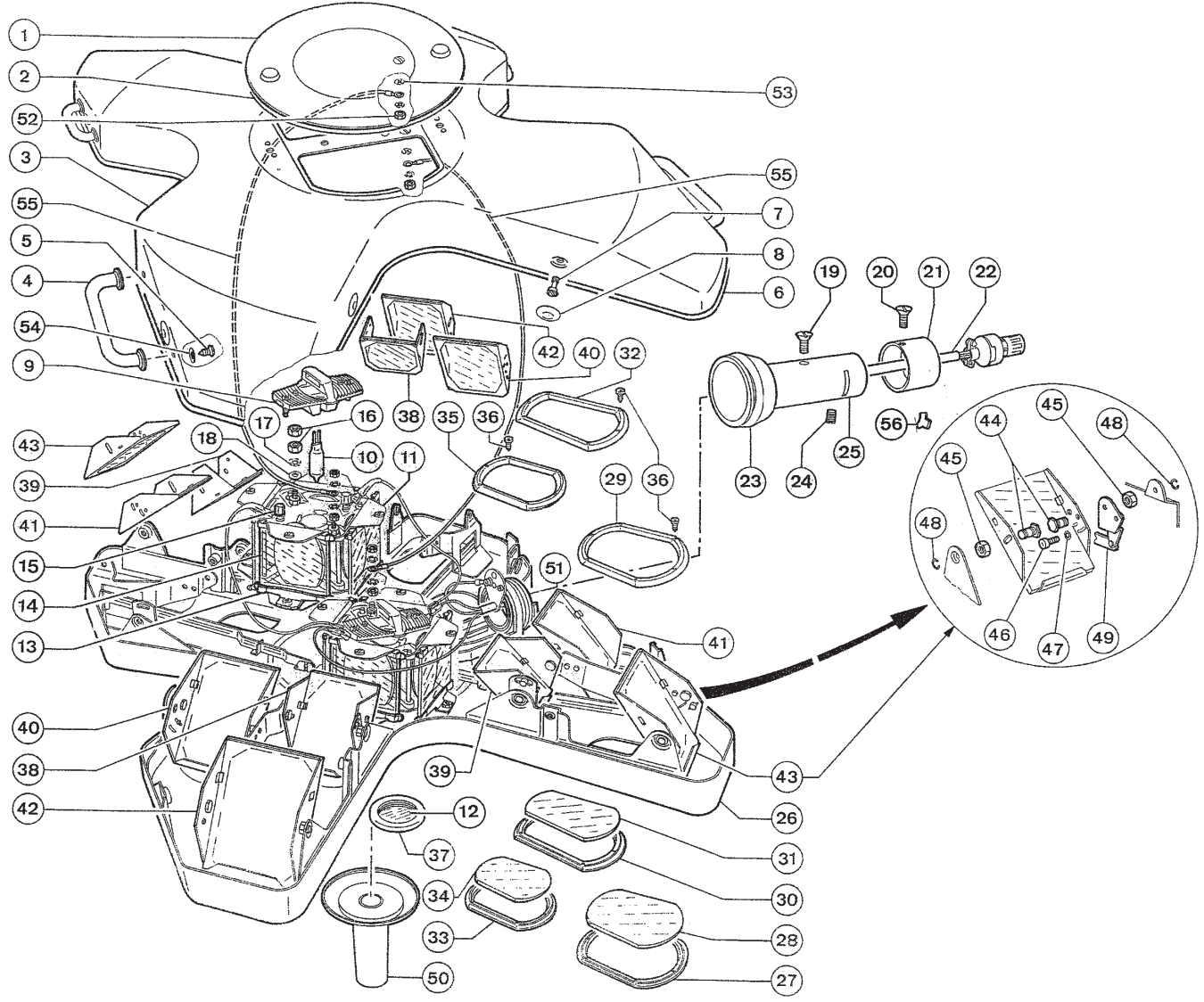

I H G F E D C B A

PROJECTEUR AX14
AX14 LIGHTHEAD
OPERATIONSLEUCHE AX14

PLANCHE/DRAWING/ZEICHNUNG **9**

ALM

02/00
Garreau

Modif:

Änd:

010733003-3


NOMENCLATURE 9
PARTS LIST 9
STÜCKLISTE 9

PLANCHE 9
DRAWING 9
ZEICHNUNG 9

PROJECTEUR AX14
AX14 LIGHTEAD
OPERATIONSLEUCHE AX14

PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Qté Qty Mg
32	160176	Support supérieur	<i>Inter. upper glass port retainer</i>	Halterung, obere	4
33	158991	Support inférieur	<i>Inner. lower glass port retainer</i>	Halterung, untere	4
34	205324	Hublot interne micro lentilles	<i>Inner glass port micro lenses</i>	Luke, innere, Mikrolinsen	4
35	160177	Support supérieur	<i>Inner upper glass port retainer</i>	Halterung, obere	4
36	909130	Vis autotaraudeuse M4 - 9	<i>Screw M4 - 9</i>	Schneidschraube M4 - 9	72
37	138958	Barillet central	<i>Centre glass port seal</i>	Federgehäuse, zentrales	2
38	125342	Support miroir SR droit	<i>Dichroic mirror (right semi-coated)</i>	Spiegelhalterung, halb abgedeckt, rechts	2
39	125343	Support miroir SR gauche	<i>Dichroic mirror (left semi-coated)</i>	Spiegelhalterung, halb abgedeckt, links	2
40	125346	Support miroir froid fixe gauche	<i>Dichroic mirror (left fixed)</i>	Spiegelhalterung, kalt, festliegend, links	2
41	125347	Support miroir froid fixe droit	<i>Dichroic mirror (right fixed)</i>	Spiegelhalterung, kalt, festliegend, rechts	2
42	125344	Support miroir froid mobile gauche	<i>Dichroic mirror (left mobile)</i>	Spiegelhalterung, kalt, mobil links	2
43	125345	Support miroir froid mobile droit	<i>Dichroic mirror (right mobile)</i>	Spiegelhalterung, kalt, mobil rechts	2
44	77690	Axe support miroir	<i>Mirror axis pin</i>	Achse der Spiegelhalterung	20
	153411	Axe support miroirs fixes	<i>Fixed mirror axis pin</i>	Achse der Spiegelhalterung, festliegend	4
45	77691	Ecrou axes miroirs	<i>Axis pin nut</i>	Mutter der Spiegelachsen	24
46	986148	Vis CHc M3 - 6	<i>Screw CHc M3 - 6</i>	Schraube CHc M3 - 6	12
47	971068	Rondelle M3 U	<i>Washer M3 U</i>	Scheibe M 3 U	12
48	921380	Anneau 7103	<i>Spring clip 7103</i>	Ring 7103	24
49	138449	Levier M.F mobile gauche équipé	<i>Focus lever (left)</i>	Fokussierungshebel, mobil, links, bestückt	2
	138448	Levier M.F mobile droit équipé	<i>Focus lever (right)</i>	Fokussierungshebel, mobil, rechts, bestückt	2
50	187306	Poignée stérilisable	<i>Sterilisable handle</i>	Griff, sterilisierbar	1
51		Support de bras d'articulation voir 188377 - A	<i>Optical assembly support See 188377 - A</i>	Halterung des Schwenkarms Siehe 188377 - A	1
52	950118	Ecrou M4	<i>Nut M4</i>	Mutter M4	6
53	971048	Rondelle dentée DE 4	<i>Washer DE 4</i>	Zahnscheibe DE 4	8
54	971045	Rondelle	<i>Washer</i>	Scheibe	8
55	188062	Cordon de masse	<i>Earthing wire</i>	Masse-Verbindungsleitung	2
56	113567	Secteur	<i>Retaining clip</i>	Bogenstück	

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

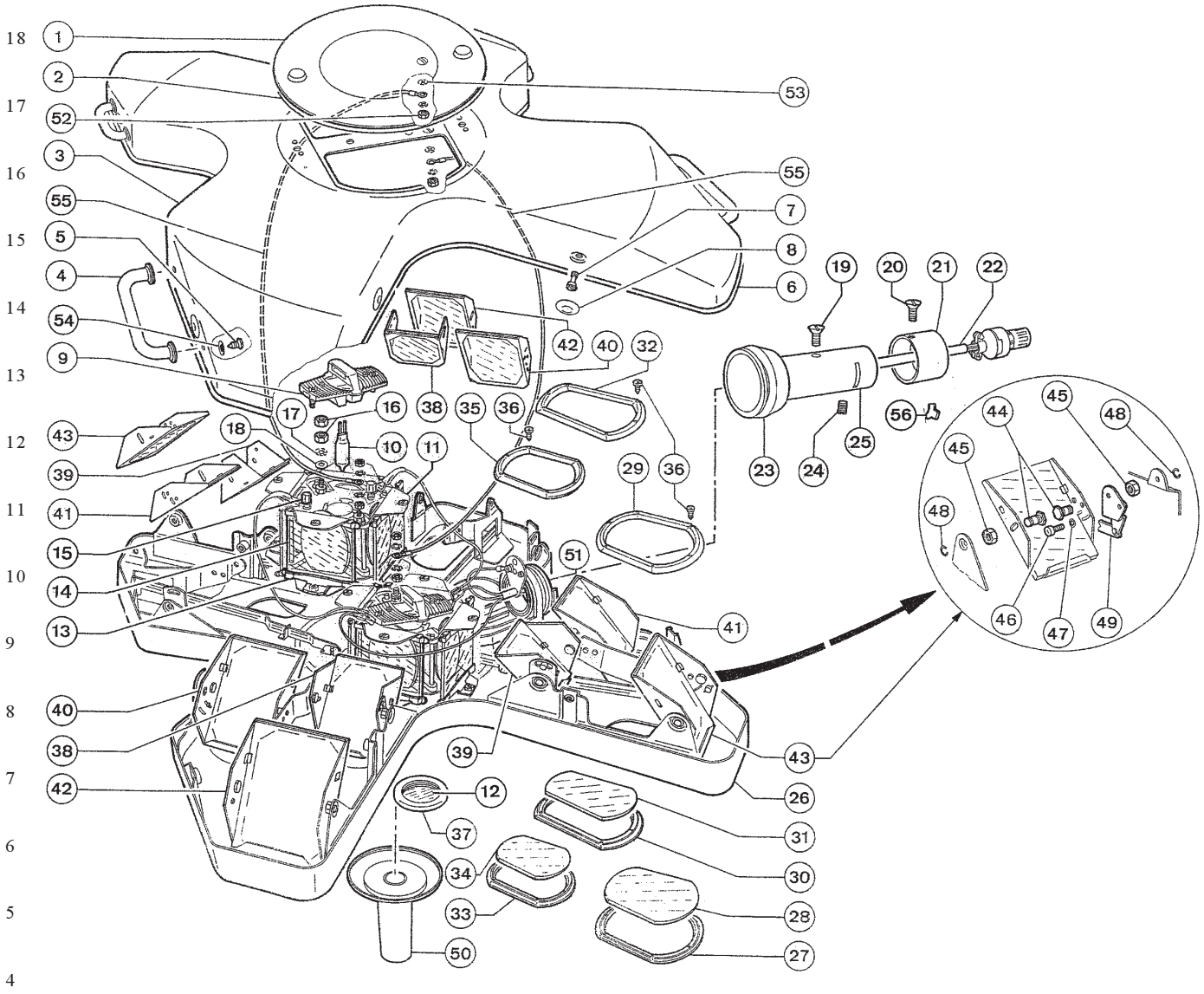

I H G F E D C B A

**PROJECTEUR AX14
AX14 LIGHTHEAD
OPERATIONSLEUCHE AX14**

PLANCHE/DRAWING/ZEICHNUNG **9**

ALM

02/00
Garreau

Modif:

Änd:

010733003-3


NOMENCLATURE 10
PARTS LIST 10
STÜCKLISTE 10

PLANCHE 10
DRAWING 10
ZEICHNUNG 10

BRAS D'ÉQUILIBRAGE AX4
SPRING ARM AX4
AUSGLEICHARM AX4

PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Qté Qty Mg
1	180363	Fiche femelle	<i>Female plug</i>	Steckdose	1
2	204819	Circlips	<i>Retaining clip</i>	Sicherungsring	1
3	204816	Rondelle de friction	<i>Friction washer</i>	Spannscheibe	2
4	204817	Rondelle d'appui	<i>Spacer</i>	Unterlegscheibe	1
5	204861	Vis de fixation fiche femelle	<i>Female plug fixation screw</i>	Befestigungsschraube der Steckdose	1
6	204850	Cache de réglage débattement	<i>Maximum height adjustment cover</i>	Abdeckung der Schwenkeinstellung	1
7	204849	Languette de protection	<i>Dust plate</i>	Schutzlasche	1
8	204867	Verrou	<i>Safety bolt</i>	Riegel	1
9	204845	Vis de fixation du verrou	<i>Safety bolt fixation screw</i>	Befestigungsschraube des Riegels	1
10	204864	Vis de fixation fiche femelle	<i>Female plug fixation screw</i>	Befestigungsschraube, Steckdose	1
11	113567	Secteur	<i>Retaining clip</i>	Bogenstück	1
12	113568	Bague de verrouillage	<i>Retaining collar</i>	Verriegelungsring	1
13	180363	Fiche femelle	<i>Female plug</i>	Steckdose	1
14	179426	Cache plastique	<i>Protective cover</i>	Abdeckung aus Plastik	1
15	981448	Vis de fixation du cache	<i>Protective cover fixation screw</i>	Befestigungsschraube der Abdeckung	1
16	204842	Vis d'arrêt bague de verrouillage	<i>Retaining collar screw</i>	Anschlagschraube des Verriegelungsring	1

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

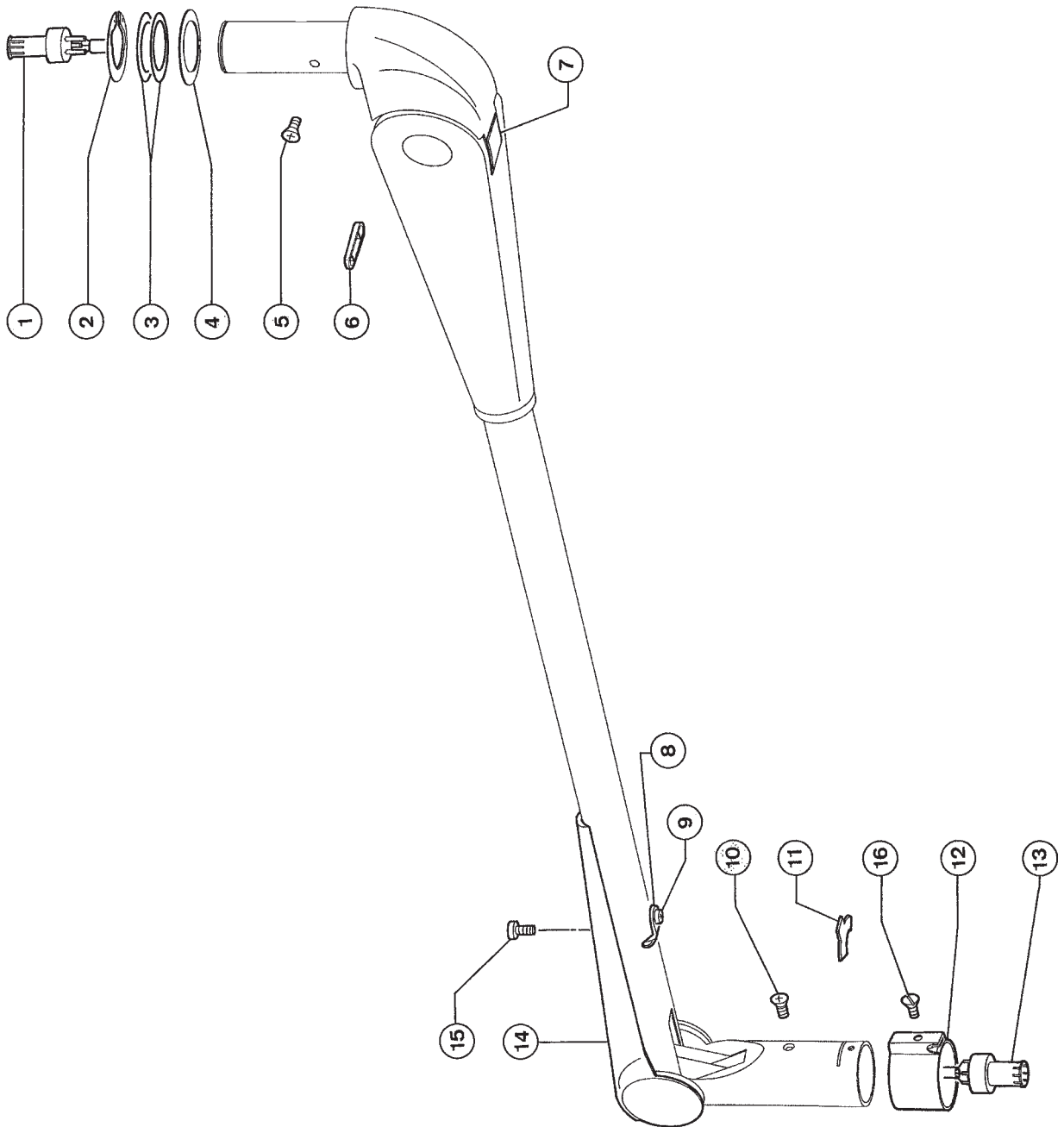

I H G F E D C B A

BRAS D'ÉQUILIBRAGE AX4
SPRING ARM AX4
AUSGLEICHARM AX4

PLANCHE/DRAWING/ZEICHNUNG **10**

ALM

02/00
Garreau

Modif:

Änd:

010733003-3

NOMENCLATURE 11
PARTS LIST 11
STÜCKLISTE 11


PLANCHE 11
DRAWING 11
ZEICHNUNG 11

BRAS D'ÉQUILIBRAGE, COUPOLE 4000-AX10 S/SAX
BALANCING ARM, AX10-4000 CUPOLA ON S/SAX
AUSGLEICHARM S/SAX DER 4000-AX10-SCHALE


PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Qté Qty Mg
1A	567209995	Bras d'équilibrage DF 4000 AX10 série SA/SAX/ACS	4000/AX10 SA/SAX/ACS DF balancing arm	Ausgleicharm DF 4000 AX10 Baureihe SA/SAX/ACS	
1B	567211995	Bras d'équilibrage DF 4000 Vidéo	Video 4000 DF balancing arm	Ausgleicharm, DF 4000 video	
1C	567218995	Bras d'équilibrage SF 4000 AX10 série SA/SAX/ACS	4000/AX10 SA/SAX/ACS SF balancing arm	Ausgleicharm SF 4000 AX10 Baureihe SA/SAX/ACS	
1D	567212995	Bras d'équilibrage SF 4000 Vidéo	Video 4000 SF balancing arm	Ausgleicharm SF 4000 video	
35A	567008002	Frein	Brake	Bremse	1
125A	367202555	Jeu de réparation (cache + segment) Comprenant (rep. 130A, 140A, 150A, et 70A)	Repair kit (Cover + segment) comprising (items 130A, 140A, 150A and 70A)	Reparatursatz (Abdeckung + Bogenstück) beinhaltet (ref. 130A, 140A, 150A y 70A)	1

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

BRAS D'EQUILIBRAGE DF
DF BALANCING ARM
AUSGLEICHARM DF

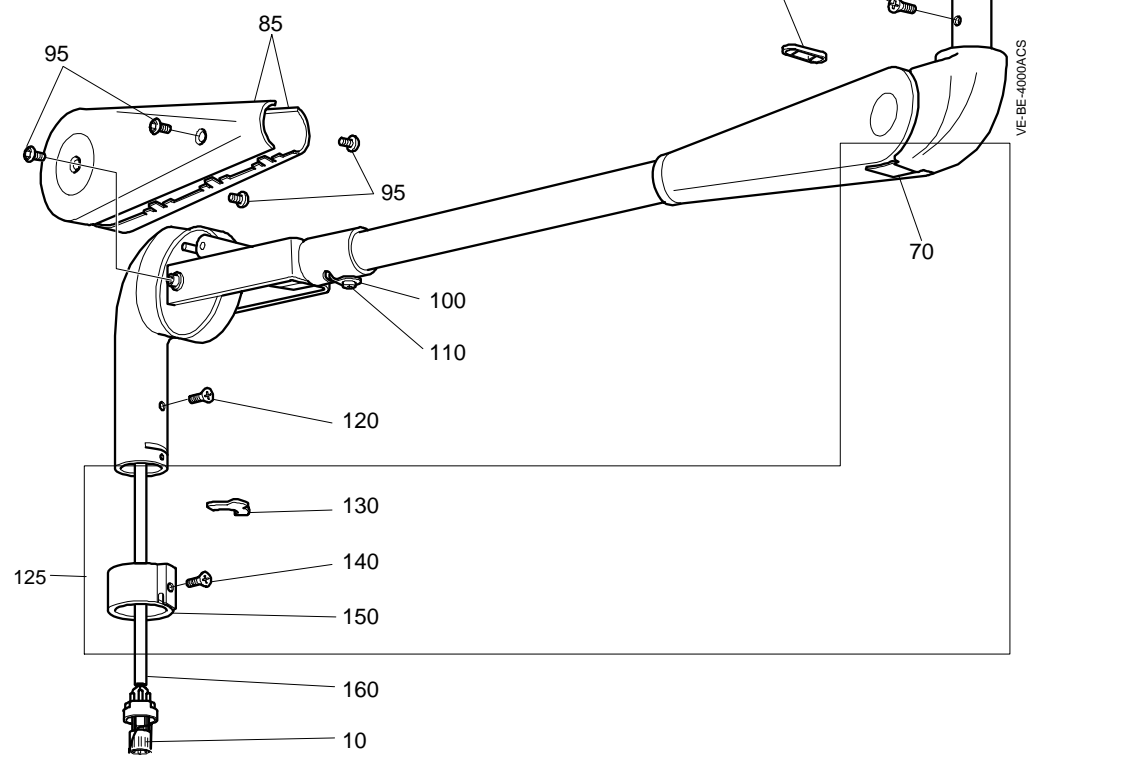

BRAS D'EQUILIBRAGE SF
SF BALANCING ARM
AUSGLEICHARM SF

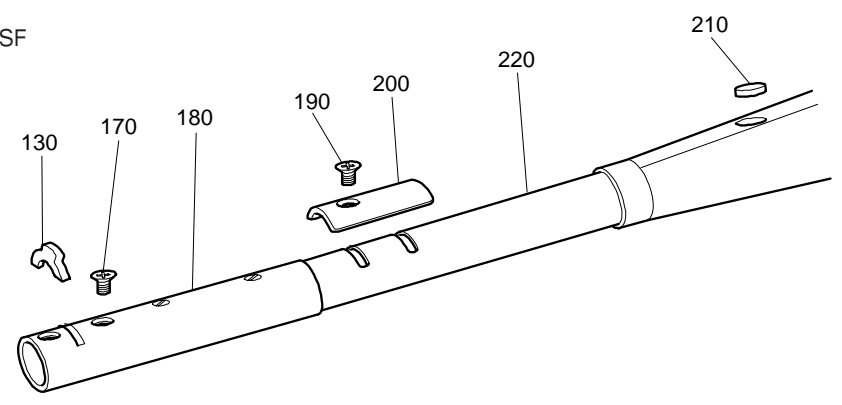

I H G F E D C B A

BRAS D'ÉQUILIBRAGE 4000-AX10 S/SAX
AX10-4000 CUPOLA BALANCING ARM ON S/SAX
AUSGLEICHARM S/SAX DER 4000-AX10 -SCHALE

PLANCHE/DRAWING/ZEICHNUNG		11
ALM		02/00 Garreau
Modif:		
Änd:		

010733003-3


NOMENCLATURE 12
PARTS LIST 12
STÜCKLISTE 12

PLANCHE 12
DRAWING 12
ZEICHNUNG 12

PROJECTEUR AX10
AX10 LIGHTEAD
OPERATIONSLEUCHE AX10

PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Qté Qty Mg
1	125330	Petit capot équipé	<i>Little cover assy.</i>	Abdeckung, kleiner, bestückt	1
2	154544	Bouton 1/4 tour	<i>Bulb cover knob</i>	Drucktaster ¼ Umdrehung	2
3	153093	Joint capot central	<i>Bulb cover seal</i>	Dichtung, zentrale Abdeckhaube	1
4	186752	Grand capot équipé	<i>Tall cover assy.</i>	Abdeckung, groß, bestückt	1
5	104857	Poignée	<i>Non sterile handle</i>	Griff	4
6	971045	Rondelle dentée DE 4	<i>Washer DE 4</i>	Zahnscheibe DE 4	8
7	981418	Vis CBL M4	<i>Screw CBL M4</i>	Schraube CBL M4	8
8	187482	Tôle sertie	<i>Upper casing wing retainer</i>	Blech, gefalzt	4
9	186984	Entretoise	<i>Spacer column</i>	Abstandstück	4
10	152318	Support de miroir	<i>Dichroic mirror holder</i>	Spiegelhalterung	8
11	135975	Miroir froid	<i>Dichroic mirror</i>	Spiegel, kalt	8
12	162798	Support de lampe	<i>Bulb holder</i>	Lampenhalterung	2
13	186762	Lampe G6.35 100/24	<i>Bulb G6.35 100/24</i>	Glühlampe G6.35 100/24	2
14	950118	Ecrou H M4	<i>Nut H M4</i>	Mutter HM4	32
15	971048	Rondelle DE 4	<i>Washer DE 4</i>	Scheibe DE 4	20
16	187465	Bloc optique	<i>Optical block</i>	Optischen Block	2
17	156153	Hublot catathermique	<i>Athermal filters</i>	Luke, katathermische	2
18	160176	Support supérieur	<i>Upper glass port retainer</i>	Halterung, obere	8
19	151686	Tige	<i>Rod</i>	Stange	6
20		Support de bras articulé 188 377- A	<i>Yoke assembly support 188 377- A</i>	Halterung des Schwenkarms 188 377-A	1
21	187909	Pièce fixation capot	<i>Upper casing fixation nut</i>	Befestigungsteil, Abdeckung	4
22	204576	Vis retouchée	<i>Screw</i>	Tornillo rectificado	4
23	187394	Rondelle nylon	<i>Nylon washer</i>	Scheibe aus Nylon	4
24	205325	Hublot micro lentilles	<i>Glass port micro lenses</i>	Luke, Mikrolinsen	8
25	158990	Support inférieur	<i>Inner lower glass port retainer</i>	Halterung, untere	8
26	204582	Hublot central	<i>Centre glass port</i>	Luke, zentrale	2
27	138958	Barillet central	<i>Centre glass port seal</i>	Federgehäuse, zentrales	2
28	187306	Poignée stérilisable	<i>Sterilisable handle</i>	Sterilisierbarer Griff	1
29	113567	Secteur	<i>Retaining clip</i>	Bogenstück	1
30	204866	Vis de fixation fiche femelle	<i>Female plug fixation screw</i>	Befestigungsschraube, Steckdose	1

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

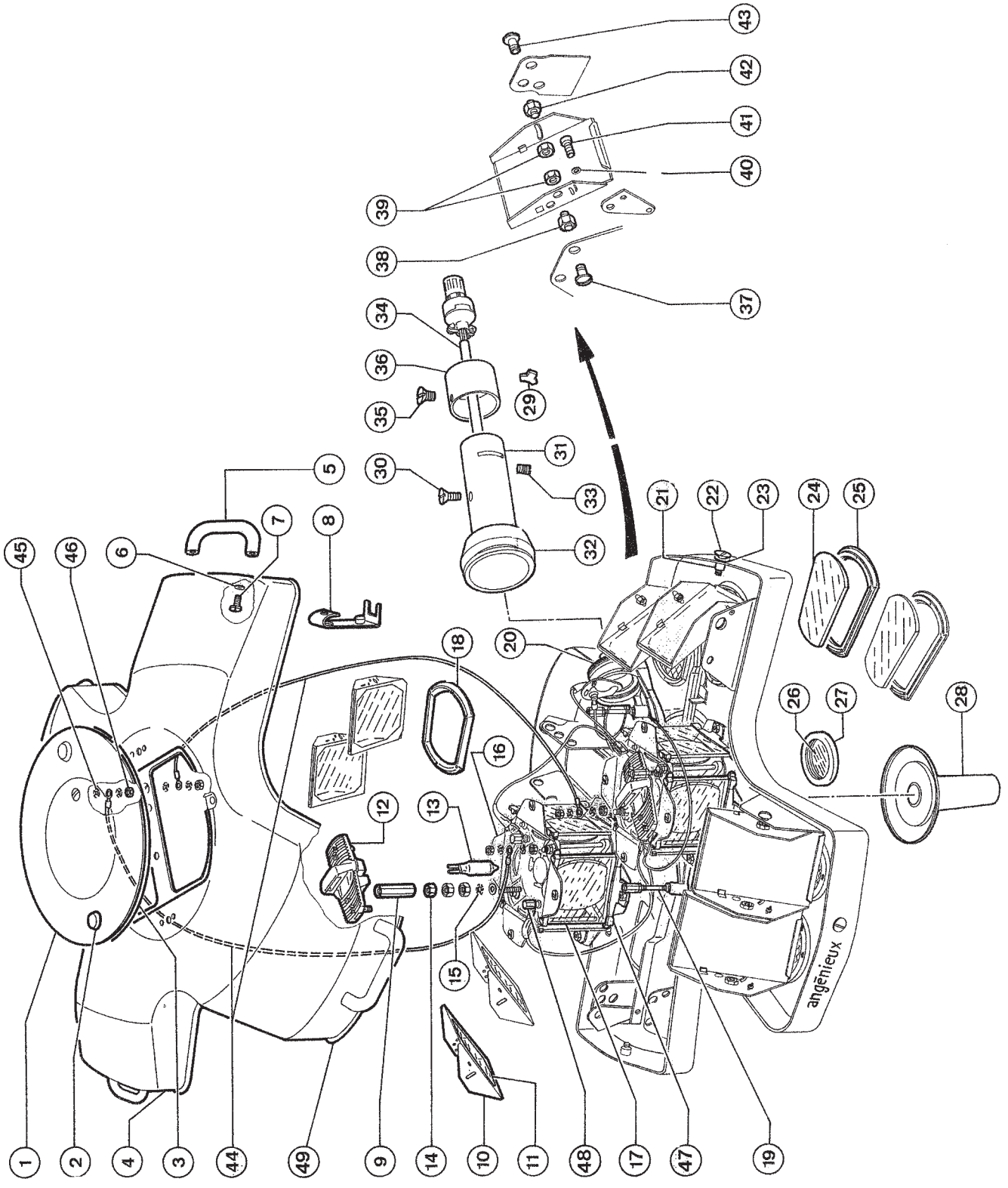

I H G F E D C B A

PROJECTEUR AX10
AX10 LIGHTHEAD
OPERATIONSLEUCHTE AX10

PLANCHE/DRAWING/ZEICHNUNG **12**

ALM

02/00
Garreau

Modif:

Änd:

010733003-3


NOMENCLATURE 12
PARTS LIST 12
STÜCKLISTE 12

PLANCHE 12
DRAWING 12
ZEICHNUNG 12

PROJECTEUR AX10
AX10 LIGHTEAD
OPERATIONSLEUCHE AX10

PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Qté Qty Mg
31		Manchon	<i>Sleeve</i>	Muffe	1
32	138495	Joint	<i>Seal</i>	Dichtung	1
33	204814	Frein d'arceau	<i>Yoke Break</i>	Bügelbremse	1
34	205098	Faisceau	<i>Cable harness</i>	Kabelbündel	1
35	204863	Vis de fixation bague de verrouillage	<i>Retaining collar fixation screw</i>	Besfestigungsschraube des Verriegelungsring	1
36	204833	Bague de verrouillage	<i>Retaining collar</i>	Verriegelungsring	1
37	185815	Vis poelier M4	<i>Screw M4</i>	Ansatzschraube M4	16
38	186985	Pivot miroir	<i>Mirror axis</i>	Drehzapfen des Spiegels	16
39	77691	Ecrou du miroir	<i>Mirror nut</i>	Spiegelmutter	16
40	97106	Rondelle M3 U	<i>Washer M3 U</i>	Scheibe M 3 U	4
41	986148	Vis CHc M3	<i>Screw CHc M3</i>	Schraube CHc M3	4
42	186985	Pivot miroir	<i>Mirror axis</i>	Drehzapfen des Spiegels	16
43	185815	Vis poelier M4	<i>Screw M4</i>	Ansatzschraube M4	16
44	188062	Cordon de masse	<i>Earthing wire</i>	Masse-Verbindungsleitung	2
45	971048	Rondelle DE 4	<i>Washer DE 4</i>	Scheibe DE 4	8
46	950118	Ecrou H M4	<i>Nut H M4</i>	Mutter HM4	6
47	270590	Arrêtoir	<i>Athermal filter holder</i>	Sperre	16
48	174723	Douille panneau	<i>Bulb holder socket assy.</i>	Buchse, Paneel	4
49	188435	Joint du grand capot	<i>Cover seal</i>	Dichtung, große Abdeckung	1

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

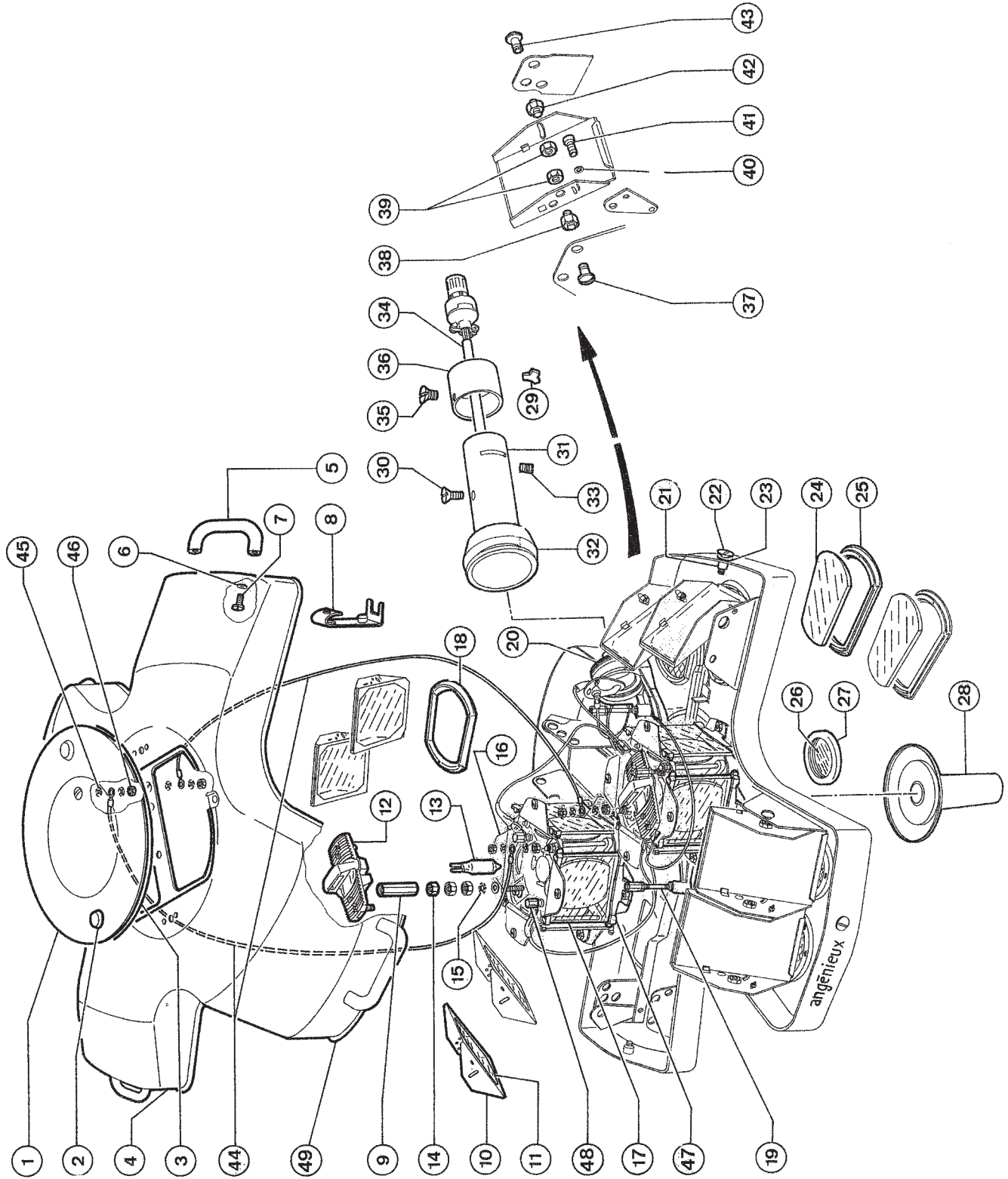

I H G F E D C B A

PROJECTEUR AX10
AX10 LIGHTHEAD
OPERATIONSLEUCHE AX10

PLANCHE/DRAWING/ZEICHNUNG		12
ALM		02/00 Garreau
Modif:		
Änd:		

010733003-3


NOMENCLATURE 13
PARTS LIST 13
STÜCKLISTE 13

PLANCHE 13
DRAWING 13
ZEICHNUNG 13

ARCEAU AX10 - AX14
AX14 - AX10 YORE ASSEMBLY
BÜGEL AX10 - AX14

PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Qté Qty Mg
1		Demi-arceau supérieur	<i>Upper hemi-yoke</i>	Halb-Bügel, oberer	1
2	204831	Faisceau demi-arceau supérieur	<i>Upper hemi-yoke cable harness</i>	Kabelbündel, oberer Halb-Bügel	1
3	270602	Fiche mâle	<i>Male plug</i>	Stecker	3
4	204818	Rondelle éventail	<i>Washer</i>	Fächerscheibe	6
5	204845	Vis fixation fiche mâle	<i>Male plug fixation screw</i>	Befestigungsschraube, Stecker	6
6	204830	Porte de visite	<i>Access plate</i>	Zugangsklappe	4
7	204837	Vis de fixation porte de visite	<i>Access plate screw</i>	Befestigungsschraube, Zugangsklappe	1
8	204829	Demi-arceau inférieur	<i>Lower hemi-yoke</i>	Halb-Bügel, unterer	1
9	204832	Faisceau demi-arceau inférieur	<i>Lower hemi-yoke cable harness</i>	Kabelbündel, unterer Halb-Bügel	1
10	180363	Fiche femelle	<i>Female plug</i>	Steckdose	1
11	204833	Bague de verrouillage	<i>Retaining collar</i>	Verriegelungsring	1
12	204863	Vis de fixation bague de verrouillage	<i>Retaining collar fixation screw</i>	Befestigungsschraube, Verriegelungsring	1
13	113567	Secteur	<i>Retaining clip</i>	Bogenstück	2
14	204814	Frein d'arceau	<i>Yoke brake</i>	Bügelbremse	1
15	204866	Vis de fixation fiche femelle	<i>Female plug fixation screw</i>	Befestigungsschraube, Steckdose	1
16	204864	Rondelle	<i>Washer</i>	Scheibe	1
17	204859	Vis de fixation porte de visite	<i>Access plate fastening screw</i>	Befestigungsschraube, Zugangsklappe	2
18	204857	Vis de fixation porte de visite	<i>Access plate fastening screw</i>	Befestigungsschraube, Zugangsklappe	1

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

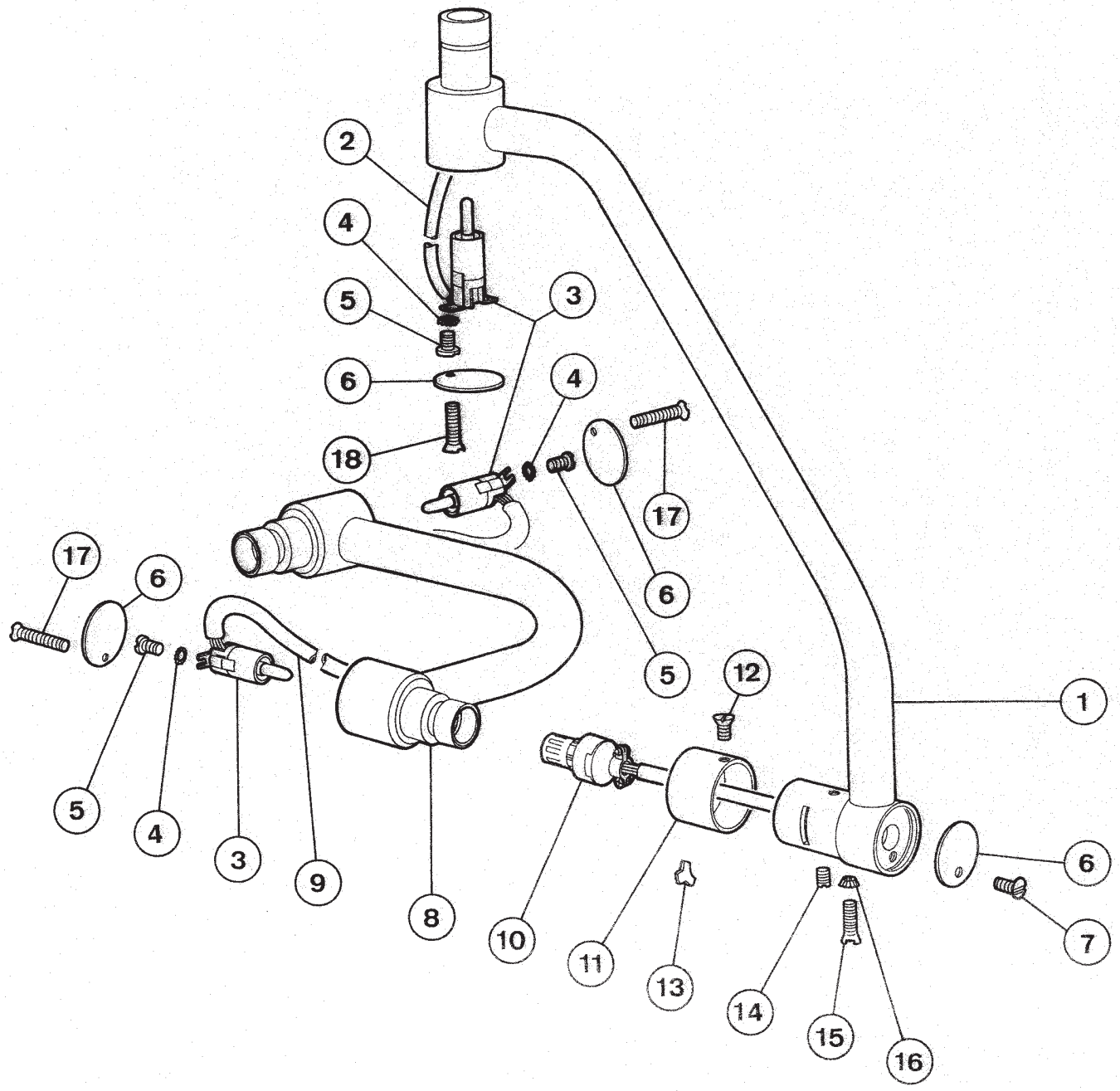

I H G F E D C B A

ARCEAU AX10 - AX14
AX14 - AX10 YORE ASSEMBLY
BÜGEL AX10 - AX14

PLANCHE/DRAWING/ZEICHNUNG 13	
ALM	02/00 Garreau
Modif:	
Änd:	

010733003-3


NOMENCLATURE 14
PARTS LIST 14
STÜCKLISTE 14

PLANCHE 14
DRAWING 14
ZEICHNUNG 14

SUSPENSION POUR AX4 S
SUSPENSION FOR AX4 S
AUFHÄNGUNG FÜR AX4 S

PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Qté Qty Mg
10A à 40A	567219995	Kit capot	Cover kit	Satz, Abdeckung	
■ 50A à 120A	567203995	Réhausse	Spacer	Aufsatz	
■ 130A à 150A	567205995	Bras principal	Main arm	Hauptarm	
■ 160A à 230A	567214995	Bras d'équilibrage PRX	PRX balancing arm	Ausgleicharm PRX	
■ 160A à 230A	187997	Bras d'équilibrage AX	AX balancing arm	Ausgleicharm AX	
150A	367208555	Jeu de réparation contact tournant bras d'équilibrage	Repair kit for rotating contact balancing arm	Reparatursatz für Drehkontakt des Ausgleicharms	

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

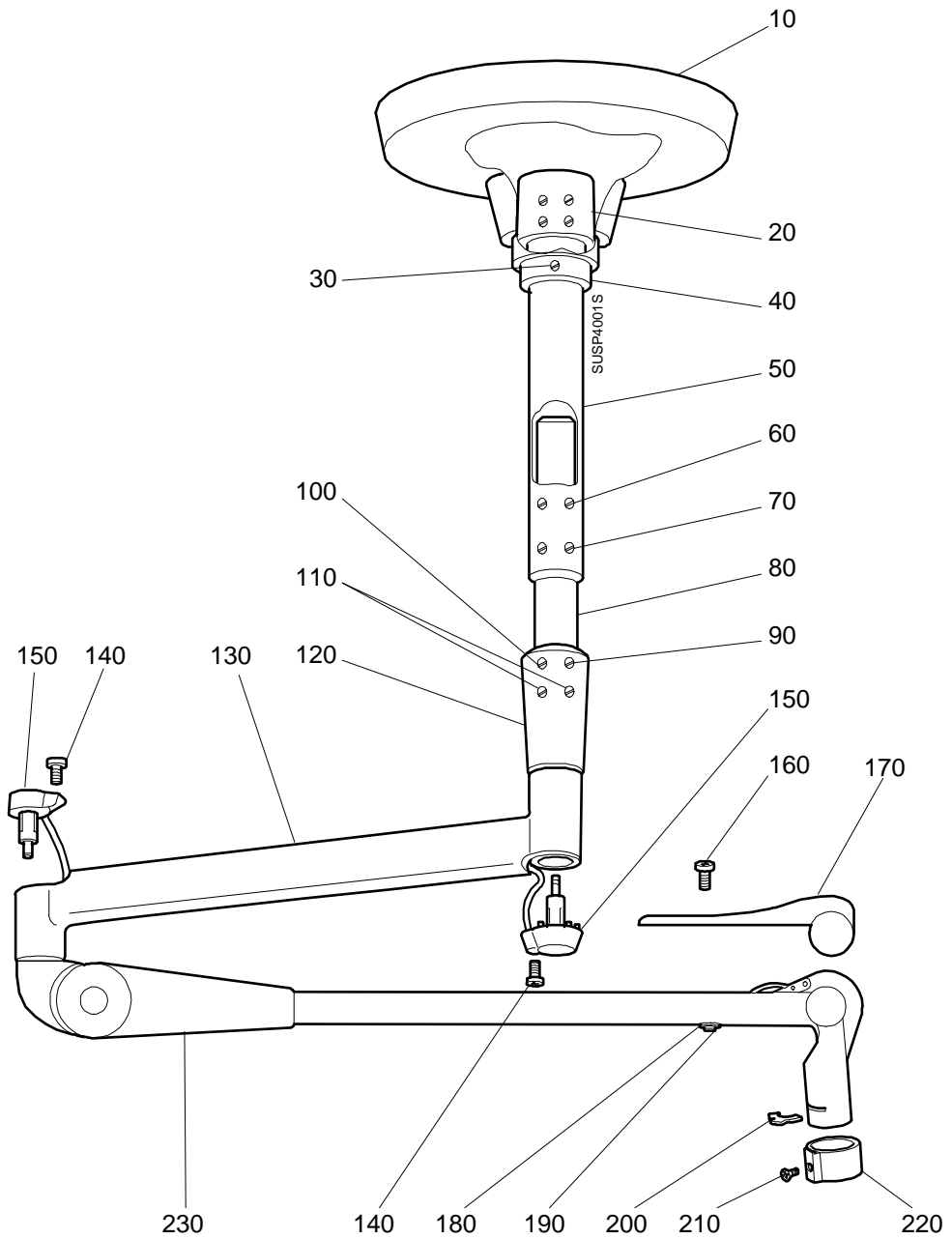

I H G F E D C B A

SUSPENSION POUR AX4 S
SUSPENSION FOR AX4 S
AUFHÄNGUNG FÜR AX4 S

PLANCHE/DRAWING/ZEICHNUNG		14
ALM		02/00 Garreau
Modif:		
Änd:		

010733003-3


NOMENCLATURE 15
PARTS LIST 15
STÜCKLISTE 15

PLANCHE 15
DRAWING 15
ZEICHNUNG 15

SUSPENSION POUR AX4 DUO S
SUSPENSION FOR AX4 DUO S
AUFHÄNGUNG FÜR AX4 DUO S

PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Qté Qty Mg
10A à 40A	567219995	Kit capot	Cover Kit	Satz, Abdeckung	
■ 50A à 80A, 130A, 140A	5672995	Réhausse	Spacer	Aufsatz	
■ 90A, 100A, 150A	567206995	Bras principal	Main arm	Hauptarm	
■ 180A, 110A 120A, 210A	567214995	Bras d'équilibrage PRX	PRX balancing arm	Ausgleicharm PRX	
■ 180A, 110A, 120A, 210A	187104	Bras d'équilibrage AX	AX balancing arm	Ausgleicharm AX	
100A	367208555	Jeu de réparation contact tournant bras d'équilibrage	Repair kit for rotating contact balancing arm	Reparatursatz für Drehkontakt des Ausgleicharms	

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

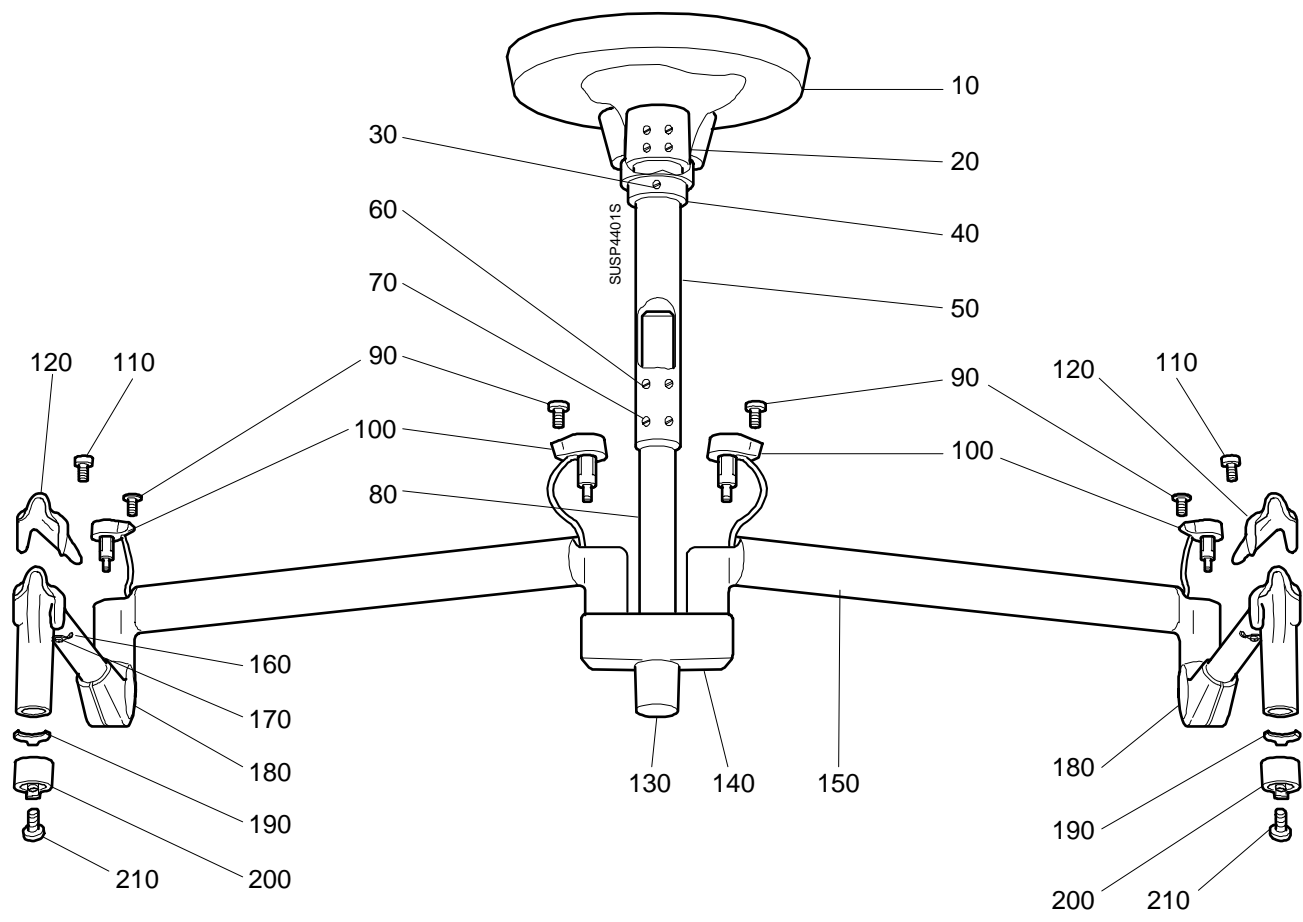

I H G F E D C B A

SUSPENSION POUR AX4 DUO S
SUSPENSION FOR AX4 DUO S
AUFHÄNGUNG FÜR AX4 DUO S

PLANCHE/DRAWING/ZEICHNUNG 15	
ALM	02/00 Garreau
Modif:	
Änd:	

010733003-3


NOMENCLATURE 16
PARTS LIST 16
STÜCKLISTE 16

PLANCHE 16
DRAWING 16
ZEICHNUNG 16

SUSPENSION POUR AX4 M - DUO M
SUSPENSION FOR AX4 M - DUO M
AUFHÄNGUNG FÜR AX4 M - DUO M

PL. S/E REP. DR. S/A REF. DA UBG ORTZ	REFERENCE REFERENCE KENNZEICHEN	DESIGNATION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	Qté Qty Mg
10A, 20A	567201995	Support mural	<i>Spacer</i>	Wandabstützung	
30A,40A,50A	567202995	Bras principal	<i>Main arm</i>	Hauptarm	
60A à 110A	567214995	Bras d'équilibrage PRX	<i>PRX balancing arm</i>	Ausgleicharm PRX	
60A à 110A	187104	Bras d'équilibrage AX	<i>AX balancing arm</i>	Ausgleicharm AX	
40A	67208555	Jeu de réparation contact tournant bras d'équilibrage	<i>Repair kit for rotating contact balancing arm</i>	Reparatursatz für Drehkontakt des Ausgleicharms	

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

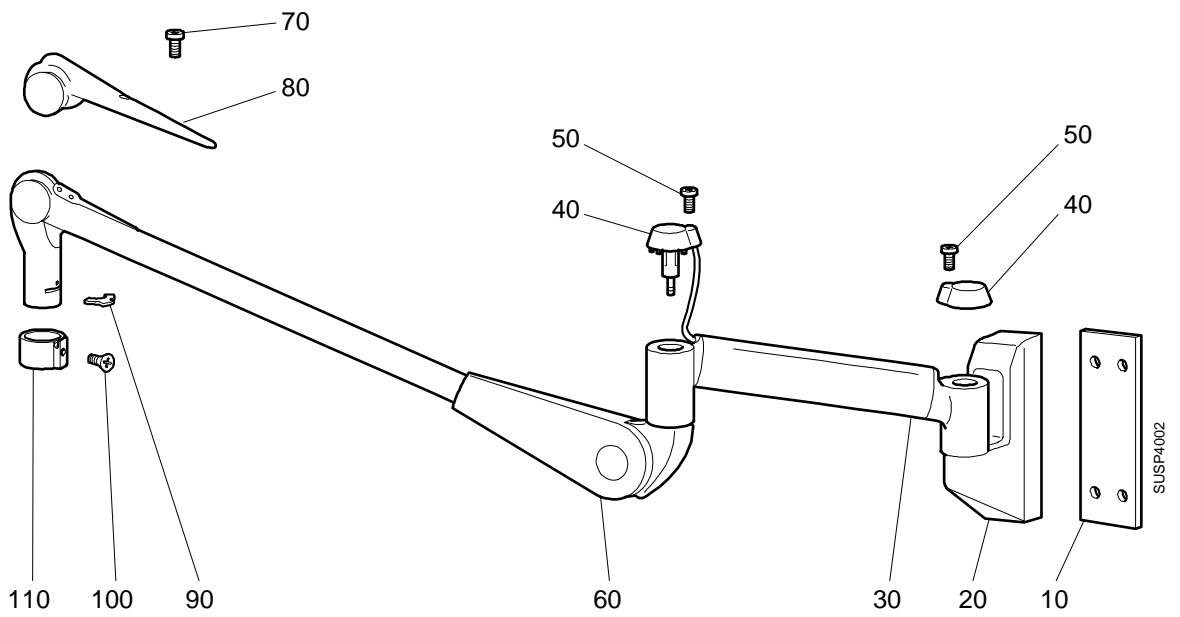

I H G F E D C B A

SUSPENSION POUR AX4 M - DUO M
SUSPENSION FOR AX4 M - DUO M
AUFHÄNGUNG FÜR AX4 M - DUO M

PLANCHE/DRAWING/ZEICHNUNG **16**

ALM

02/00
Garreau

Modif:

Änd:

010733003-3

1 an year Jahr

Date de la révision : _____ Nom de l'entreprise : _____

Service date : _____ Company name : _____

Datum der Wartung : _____ Name des Unternehmens : _____

Nom du technicien : _____ Visa : _____

Technician name : _____ Signature : _____

Name des Technikers : _____ Unterschrift : _____

Remarques suite à la révision, nature des réparations effectuées et pièces changées :

Comments after the service, nature of repairs made and parts changed:

Anmerkungen bezüglich der Wartung, Ursache der Wartung und ausgewechselte Teile:

2 ans years Jahre

Date de la révision : _____ Nom de l'entreprise : _____

Service date : _____ Company name : _____

Datum der Wartung : _____ Name des Unternehmens : _____

Nom du technicien : _____ Visa : _____

Technician name : _____ Signature : _____

Name des Technikers : _____ Unterschrift : _____

Remarques suite à la révision, nature des réparations effectuées et pièces changées :

Comments after the service, nature of repairs made and parts changed:

Anmerkungen bezüglich der Wartung, Ursache der Wartung und ausgewechselte Teile:

3 ans years Jahre

Date de la révision : _____ Nom de l'entreprise : _____

Service date : _____ Company name : _____

Datum der Wartung : _____ Name des Unternehmens : _____

Nom du technicien : _____ Visa : _____

Technician name : _____ Signature : _____

Name des Technikers : _____ Unterschrift : _____

Remarques suite à la révision, nature des réparations effectuées et pièces changées :

Comments after the service, nature of repairs made and parts changed:

Anmerkungen bezüglich der Wartung, Ursache der Wartung und ausgewechselte Teile:

4 ans years Jahre

Date de la révision : _____ Nom de l'entreprise : _____

Service date : _____ Company name : _____

Datum der Wartung : _____ Name des Unternehmens : _____

Nom du technicien : _____ Visa : _____

Technician name : _____ Signature : _____

Name des Technikers : _____ Unterschrift : _____

Remarques suite à la révision, nature des réparations effectuées et pièces changées :

Comments after the service, nature of repairs made and parts changed:

Anmerkungen bezüglich der Wartung, Ursache der Wartung und ausgewechselte Teile:

5 ans years Jahr

Date de la révision : _____ Nom de l'entreprise : _____

Service date : _____ Company name : _____

Datum der Wartung : _____ Name des Unternehmens : _____

Nom du technicien : _____

Visa : _____

Technician name : _____

Signature : _____

Name des technikers : _____

Unterschrift : _____

Remarques suite à la révision, nature des réparations effectuées et pièces changées :

Comments after the service, nature of repairs made and parts changed:

Anmerkungen bezüglich der Wartung, Ursache der Wartung und ausgewechselte Teile:

6 ans years Jahr

Date de la révision : _____ Nom de l'entreprise : _____

Service date : _____ Company name : _____

Datum der Wartung : _____ Name des Unternehmens : _____

Nom du technicien : _____

Visa : _____

Technician name : _____

Signature : _____

Name des technikers : _____

Unterschrift : _____

Remarques suite à la révision, nature des réparations effectuées et pièces changées :

Comments after the service, nature of repairs made and parts changed:

Anmerkungen bezüglich der Wartung, Ursache der Wartung und ausgewechselte Teile:

7 ans years Jahr

Date de la révision : _____ Nom de l'entreprise : _____

Service date : _____ Company name : _____

Datum der Wartung : _____ Name des Unternehmens : _____

Nom du technicien : _____

Visa : _____

Technician name : _____

Signature : _____

Name des technikers : _____

Unterschrift : _____

Remarques suite à la révision, nature des réparations effectuées et pièces changées :

Comments after the service, nature of repairs made and parts changed:

Anmerkungen bezüglich der Wartung, Ursache der Wartung und ausgewechselte Teile:

8 ans years Jahr

Date de la révision : _____ Nom de l'entreprise : _____

Service date : _____ Company name : _____

Datum der Wartung : _____ Name des Unternehmens : _____

Nom du technicien : _____

Visa : _____

Technician name : _____

Signature : _____

Name des technikers : _____

Unterschrift : _____

Remarques suite à la révision, nature des réparations effectuées et pièces changées :

Comments after the service, nature of repairs made and parts changed:

Anmerkungen bezüglich der Wartung, Ursache der Wartung und ausgewechselte Teile:



9 ans years Jahr

Date de la révision : _____ Nom de l'entreprise : _____

Service date : _____ Company name : _____

Datum der Wartung : _____ Name des Unternehmens : _____

Nom du technicien : _____ Visa : _____

Technician name : _____ Signature : _____

Name des technikers : _____ Unterschrift : _____

Remarques suite à la révision, nature des réparations effectuées et pièces changées :
Comments after the service, nature of repairs made and parts changed:
Anmerkungen bezüglich der Wartung, Ursache der Wartung und ausgewechselte Teile:

10 ans years Jahr

Date de la révision : _____ Nom de l'entreprise : _____

Service date : _____ Company name : _____

Datum der Wartung : _____ Name des Unternehmens : _____

Nom du technicien : _____ Visa : _____

Technician name : _____ Signature : _____

Name des technikers : _____ Unterschrift : _____

Remarques suite à la révision, nature des réparations effectuées et pièces changées :
Comments after the service, nature of repairs made and parts changed:
Anmerkungen bezüglich der Wartung, Ursache der Wartung und ausgewechselte Teile:

Contactez la société ALM pour obtenir un nouveau carnet de suivi de révisions, ainsi qu'un nouveau document de maintenance périodique.

Contact ALM to obtain a new service handbook and a new periodic maintenance document.

Wir bitten Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um ein neues Wartungsheft und ein neues periodisches Wartungsdokument zu erhalten.

ALM

Notre réseau reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions.

Our network is at your disposal if you have any queries.

Bei Fragen richten Sie sich bitte an unser Netz. Wir beraten Sie gerne.



angénieux



ISO 9001
Certificat
Certificate
Zertifikat
AFAQNr.1989-032

 **GETINGE**

ALM

Parc de Limère - rue de la pomme de pin - ARDON 45074 ORLÉANS CEDEX 2 - FRANCE

Tél. 02.38.25.88.88 - Fax 02.38.25.88.00