

## Ändern der Bildgebungseinstellungen

Zum Ändern der Bildgebungseinstellungen:

1. Auf dem Sensorfeld auf **Utility** drücken.
2. Auf dem Sensorfeld auf **Imaging (Bildgebung)** drücken. Siehe Bildschirm Imaging unten.
3. Am oberen Bildschirmrand in den Registerkartenreitern den Modus auswählen.
4. In der Liste **Preset** (Einstellung) die Untersuchung auswählen.
5. In der Liste **Probe** (Schallkopf) den Schallkopf auswählen.

Das System zeigt zwei Listen mit Parametern und Einstellungen an. In der linken Spalte finden Sie Einstellungen für die Untersuchung (z. B. Abdomen). In der rechten Spalte werden Einstellungen aufgelistet, die sich auf die Kombination zwischen Untersuchung und Schallkopf beziehen (z. B. Abdomen und 3.5C).

6. Ein Parameter kann mit einer der folgenden Methoden geändert werden:
  - Einen Wert aus einer Liste auswählen.
  - Einen Wert aus einer Auswahl aus zwei oder mehr Schaltflächen auswählen.
  - Das Kästchen ab- oder anwählen.
7. Nach dem Ändern der Parameter zum Speichern auf **Save** (Speichern) klicken.



*HINWEIS: Wenn die Bildgebung nicht einwandfrei funktioniert, können Sie die Parameter wieder auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen. Hierzu die Untersuchung, den Schallkopf und den Modus anwählen und dann Reload Factory Defaults (Werkseinstellungen) anwählen. Das System stellt die ursprünglichen Werkseinstellungen wieder ein.*

## Eingabe von Krankenhausinformation und System-Datum und -Uhrzeit

Zur Eingabe von Krankenhausinformation, Datum und Uhrzeit:

1. Auf dem Sensorfeld auf **Utility** drücken.
2. Auf dem Sensorfeld auf **System** drücken. Siehe Bildschirm General (Allgemein) unten.
3. Im Abschnitt **Location** (Standort) den Krankenhausnamen in das Feld **Hospital** eingeben.
4. Im Abschnitt **Date and Time** die Werte für Datum und Uhrzeit auswählen.
5. Zum Speichern der Änderungen auf **Save** drücken.

Weitere Informationen zu diesen Einstellungsfunktionen finden Sie in der **LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro Bedienungsanleitung (Basis-Version)**, Kapitel 16, "Programmierung des Systems".

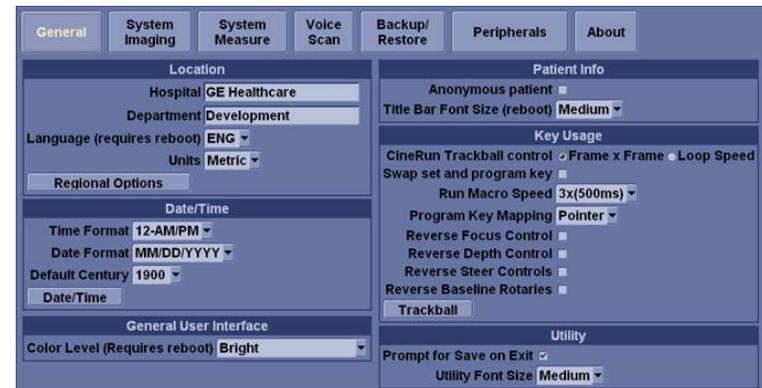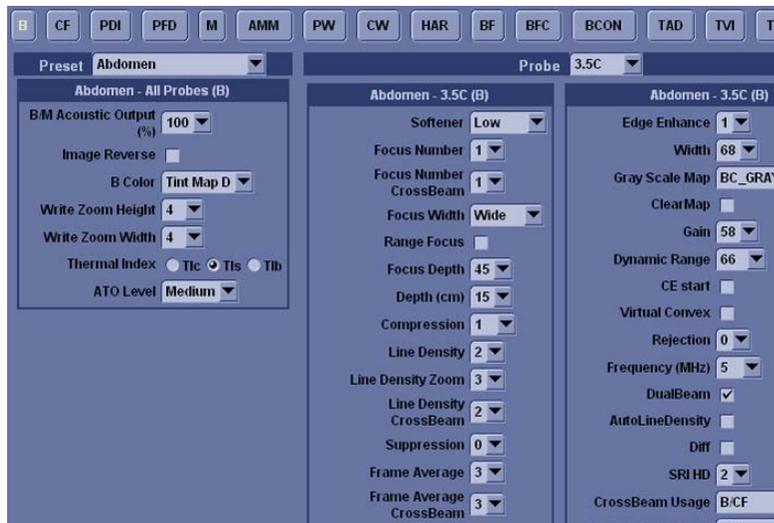

## Beschriftungs-Verzeichnisse definieren

Zum Definieren von Beschriftungen:

1. Auf dem Sensorfeld auf **Utility** drücken.
2. Auf dem Sensorfeld auf **Comments (Kommentare)** drücken.
3. Im Register **Comments** die Formatierungsinformationen wie Textfarbe und Cursorgöße festlegen.
4. Wählen Sie die Registerkarte **Libraries** (Verzeichnisse). Siehe Bildschirm Libraries (Verzeichnisse) unten.
5. Im Feld **Library** das gewünschte Verzeichnis anwählen.

Das System zeigt alle Beschriftungen des Verzeichnisses an. Für jedes Verzeichnis können zwei Sensorfelder mit Beschriftungen erscheinen (Seite1 und Seite2). Die Beschriftungen werden in der Reihenfolge angezeigt, in der bei der Verwendung auf dem Sensorfeld erscheinen.



6. Zum Ändern oder Hinzufügen einer Beschriftung den Cursor auf dem gewünschten Feld platzieren und auf **Set** (Festlegen) drücken:
  - Die Beschriftung in der Liste **Copy from Existing** (Von Vorhandener kopieren) auswählen, und auf **Set** drücken.
  - Die Beschriftung eingeben.
7. Zum Speichern der Änderungen auf **Save** drücken.

Zum Erstellen eines neuen Beschriftungsverzeichnisses:

1. Im Feld **User Defined Library** (Benutzerdefiniertes Verzeichnis) den Namen des Verzeichnisses eingeben und dann **Create** (Erstellen) anwählen. Das System erstellt ein neues Verzeichnis.

2. Die Beschriftungen wie in Schritt 6 oben beschrieben eingeben.
3. Zum Speichern der Änderungen auf **Save** drücken.

Um festzulegen, welche Verzeichnisse zu einer Anwendung gehören sollen:

1. Folgende Menüs wählen: **Utility** --> **Applications (Anwendungen)** --> Comments (Kommentare).
2. In der Liste **Preset** (Einstellung) die Anwendung auswählen.
3. In der Liste **Tags** (Registerkarte) die Verzeichnisse für diese Anwendung auswählen. Sie können bis zu sechs Verzeichnisse anwählen.
4. Im Feld **Default Tab** (Voreingestellte Registerkarte) das Verzeichnis anwählen, das das System standardmäßig bei Verwendung von Beschriftungen anzeigt.
5. Zum Speichern der Änderungen auf **Save** drücken.

Weitere Informationen zu diesen Einstellungsfunktionen finden Sie in der **LOGIQ 7/LOGIQ 7 Pro Bedienungsanleitung (Basis-Version)**, Kapitel 16, "Programmierung des Systems".

